

2026年3月（第1版）

医療用品（04）整形用品
一般医療機器 X線造影剤入りスポンジ（JMDN：13705000）

レトラクターパッド

再使用禁止

【禁忌・禁止】

・再使用禁止 再滅菌禁止

【形状、構造及び原理等】

1. 形状



サイズ	長辺×短辺	重量（乾燥重量）
L	27cm×14cm	210g（135g）
S	22cm×12cm	150g（115g）

2. 構造・原理

片方の手で本品を把持し、もう片方の手で、腸管等の臓器を術野から排除しながら、本品を2つ折りに畳んだ状態で創内に挿入します。腹壁を少々挙上しながら、丁寧に妨害臓器を圧排し、二つに折り畳まれた本品を開いて設置していきます。本品が正しく設置されているか、手指でフィッティングを確認します。（本品は、腹部のサイズに合わせてカット可能です）

3. 材質

ポリビニルアルコール（PVA）

4. 滅菌方法

ガンマ線滅菌済

【使用目的及び効果】

本品は、腹部及び骨盤内手術中に、臓器や組織を術野外に維持するために使用する器具で、出血の抑制、滲出液の吸収、擦過傷、乾燥又は汚染からの器官の保護のため、外科切開口、他の皮膚創傷又は内部構造に適用することを目的とする。また、本品はX線で検知可能な成分を含有する。

【使用方法等】

- 本品を滅菌包装より取り出し、腹腔内の処置対象臓器とその他の臓器の間に、挟み込むように固定する。
- サイズ、形状は、必要により、ハサミ等で成形することができる。
- 手術終了時に、腹腔内よりすべて取り除くこと。
（X線で検知、確認可能。）

【使用上の注意】

- 再使用禁止。また、再滅菌は行わないこと。
- 包装が破損又は汚損している場合は、使用しないこと。
- 使用中は、本品を乾燥させないでください。
- 使用後は速やかに取り除くこと。
- 使用後は感染防止に留意し、安全な方法で取り除くこと。

【保管方法及び有効期限等】

- 室温保管すること。
- 直射日光及び火気を避け、湿気の少ない場所に保存すること。
- 包装に記載されている滅菌期限内に使用し、期限を経過したものは使用しないこと。

【取扱い上の注意】

- 通常の滅菌物と同等の扱いをすること。
- 保管庫などで加温保管すると、乾燥して硬化することがある。

【製造販売業者及び製造販売業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：

株式会社平和医療器械

山口県防府市戎町2丁目4-37

TEL：0835-22-3658 FAX：0835-22-3658

製造業者：

Mondomed N.V.（ベルギー）

モンドメド