

2026年3月（第1版）

機械器具（55）医療用洗浄器

一般医療機器 内視鏡下灌流・吸引器（JMDN：70465000）

洗浄吸引プローブセット

再使用禁止

【警告】


1. 本品を洗浄水バッグに刺入あるいは抜去する場合は、必ずクランプを留め、流れを防止した後行うこと。洗浄水が圧力で噴き出すことがある。
2. スパイクの先は鋭利なので手など傷つけないように十分注意すること。

【禁忌・禁止】

再使用禁止、再滅菌禁止

【形状、構造及び原理等】

1. 形状

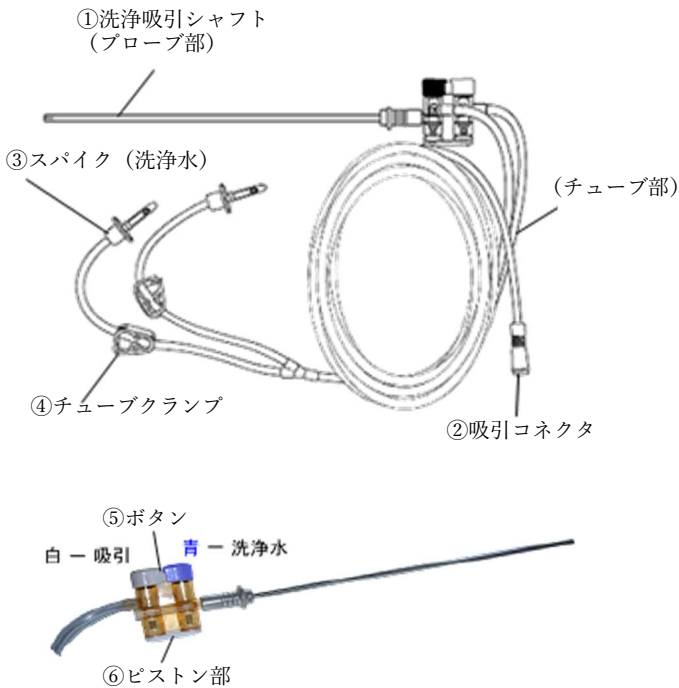

(品番)	(シャフト有効長)	(外径)
LISS4122	330mm	5mm
LISS4052	500mm	5mm

2. 構造及び原理

本品のスパイクを洗浄水バッグ等に接続し、吸引コネクタを吸引器等に接続した後、洗浄吸引シャフトをトロッカー等により挿入し、術野の洗浄、吸引を行う。

3. 原材料

チューブ部：塩化ビニール
ピストン部：プラスチック
プローブ部：ステンレス及びプラスチック

【使用目的又は効果】

手術の際に、術野を洗浄や吸引するために使用する。

【使用方法等】

1. 洗浄及び吸引システムへの接続
 - (1) 洗浄吸引プローブセットを滅菌包装より取り出し、異常がないか外観を確認する。
 - (2) ピストン部⑥の白ボタン及び青ボタン⑤を1回しっかり押す。これにより、使用する際ボタンを押す力が少なくて済む。（最初だけは、ボタンを強く押す必要がある）
 - (3) チューブクランプ④の両方を留める（閉める）。
 - (4) スパイク③を洗浄水バッグに保護キャップをとり、接続する。必要であれば、残りの方も接続する。
 - (5) チューブクランプ④を開ける。
2. 吸引への接続
吸引コネクタ②を吸引器に接続する。
3. 使用方法
 - (1) トロッカー等より、洗浄吸引シャフト①を挿入する
 - (2) 洗浄水を出す場合は、青ボタン⑤を押す。吸引の場合は白ボタン⑤を押す。
 - (3) 組織等が詰まって適切な洗浄、吸引ができない場合やサンプルを採取したい場合は、ピストン部⑥の吸引チューブを外すことができるため、外して詰まった組織等を取り除く。

【使用上の注意】

1. 本書は、製品の添付文書であり、外科手術手技を解説するものではない。
2. 使用前に必ず、ボタン（青と白両方）⑤を押し、動きをスムーズにしてから使用すること。
3. 使用前、必ず本品の外観に異常がないかどうか確認すること。異常が認められた場合、使用を中止し、新しい本品を使用すること。
4. 洗浄水バッグにスパイクを接続する前に、必ず両方のチューブクランプを留める（閉める）こと。洗浄水が噴き出し、術野を汚染する可能性がある。
5. 本品は、滅菌有効期限内であっても、包装が破損または開封していた場合は、製品の滅菌状態を保証できないので、使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

1. 高温、多湿、直射日光および水濡れを避けて室温で保管すること。一時的に室温を超える場合であっても、54℃を超えないこと。
2. 包装に傷をつけたり、ピンホールを生じさせないように取り扱いに注意してください。
3. 製品の包装に記載してある滅菌期限を必ず確認し、使用期限を過ぎたものは使用しないこと。[自己認証(社内データ)による]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：

株式会社平和医療器械
山口県防府市戎町2丁目4番37号
TEL：0835-22-3658 FAX：0835-22-3678

製造業者：

Fairmont Medical Products (オーストラリア)
フェアモント メディカル プロダクツ