

機械器具（55）医療用洗浄器

一般医療機器 内視鏡下灌流・吸引器（JMDN：70465000）

ホームポート吸引洗浄プローブセット

再使用禁止

【警告】

1. 本品を洗浄用水バッグに刺入あるいは抜去する場合は、必ずクランプを留め、流れを防止した後に行うこと。洗浄水が圧力で噴き出すことがある。
2. スパイクの先は鋭利なので、手など傷つけないように十分注意すること。


【禁忌・禁止】

再使用禁止、再滅菌禁止


【形状、構造及び原理等】

1. 形状（以下に主な形状を示す）

（通常型）

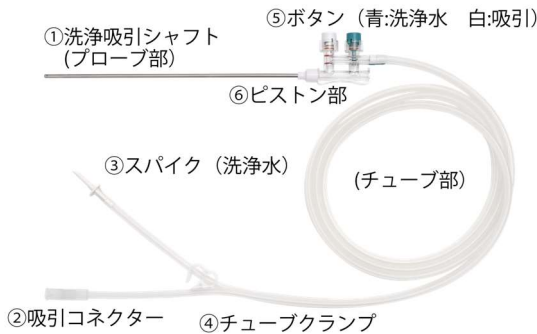

（ピストル型）

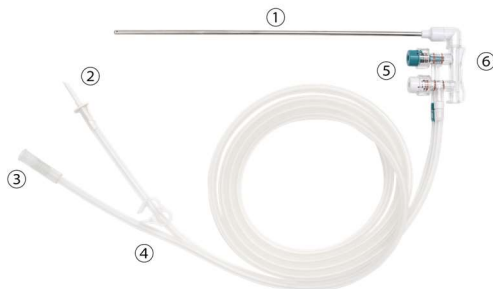

2. 構造及び原理

本品のスパイクを洗浄水バッグ等に接続し、吸引コネクタを吸引器等に接続したあと、洗浄吸引シャフトをトロッカー等により挿入し、術野の洗浄、吸引を行う。

3. 原材料

- ・チューブ部：塩化ビニール
- ・ピストン部：プラスチック
- ・プローブ部：ステンレス及びプラスチック

【使用目的又は効果】

手術の際に、術野を洗浄や吸引するために使用する。

【使用方法等】

1. 洗浄および吸引システムへの接続
 - (1) 本品を滅菌包装より取り出し、異常がないか外観を確認する。
 - (2) チューブクランプ④両方を留める（閉める）。
 - (3) スパイク③を洗浄水バッグに保護キャップを取り接続する。
 - (4) チューブクランプ④を開ける。
2. 吸引への接続
 - 吸引コネクタ②を吸引器に接続する。
3. 使用方法
 - (1) トロッカー等より、洗浄吸引シャフト①を挿入する
 - (2) 洗浄水を出す場合は、青ボタンを押す。吸引の場合は白ボタンを押す。

【使用上の注意】

- (1) 本書は、製品の添付文書であり、外科手術手技を解説するものではない。
- (2) 使用前、必ず本品の外観に異常がないかどうか確認すること。異常が認められた場合、使用を中止し、新しい本品を使用すること。
- (3) 洗浄水バッグにスパイクを接続する前は必ず両方のチューブクランプを留める（閉める）こと。洗浄水が噴き出し、術野を汚染する可能性がある。
- (4) 本品は、滅菌有効期限内であっても、包装が破損または開封していた場合は、製品の滅菌状態を保証できないので、使用しないこと。
- (5) 使用・未使用に関わらず、一旦開封した本品はすべて廃棄すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 貯蔵・保管方法
 - 高温、多湿、直射日光および水濡れを避けて室温で保管すること。一時的に室温を超える場合であっても、54℃を超えないこと。包装材料に傷をつけたり、ピンホールを生じさせないように取り扱うこと。
2. 有効期間・使用期限
 - 包装に記載してある滅菌期限を確認し、必ず滅菌期限内に使用し、期限を過ぎたものは使用しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：

株式会社平和医療器械
 山口県防府市戎町2丁目4番37号
 TEL：0835-22-3658 FAX：0835-22-3678

製造業者：

Suzhou Homeport Medical Appliance Co., Ltd.
 （中華人民共和国）

製造業者（滅菌）：

Suzhou WJR Medical Technical Co., Ltd
 （中華人民共和国）