

2026年3月(第1版)

機械器具(51) 嘴管及び体液誘導管
一般医療機器 吸引チューブ (JMDN：16779000)

再使用禁止


ハイワクションコネクティングチューブ

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止、再滅菌禁止

【形状、構造及び原理】

1. 形状

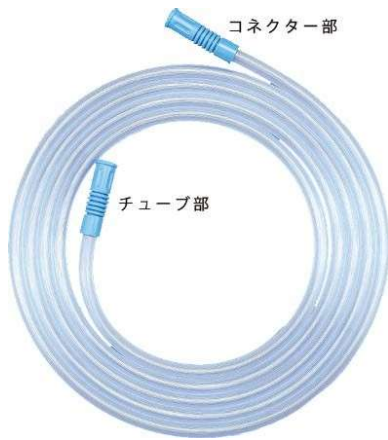

2. 構造及び原理

手術、処置等の際に使用する。コネクター一部（または、嘴管部）、チューブ部より構成される。

3. 原材料

ポリ塩化ビニール

4. 滅菌方法

エチレンオキサイド (EOG) 滅菌済

【使用目的又は効果】

本製品は、手術、処置等に使用する医療機器である。吸引器と回収容器との接続に用いる。

【使用方法等】

本品を滅菌包装より取り出し、コネクター一部を吸引器や吸引瓶または回収容器に接続する。他方を吸引し管、または、吸引が必要な機器などに取り付ける。吸引関係の機器以外には取り付けないこと。

【使用上の注意】

- 再使用及び再滅菌は、行わないこと。
- 包装が、破損または汚損している場合には使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- 貯蔵・保管するにあたっては、再汚染を防ぐため清潔な場所に保管すること。
- 直射日光及び火気を避け、湿気の少ない場所に保存すること。
- 包装に記載されている滅菌期限内に使用し、期限を経過したものは使用しないこと。

※滅菌期限の表示の見方

(例) EXP 202001 の場合、西暦 2020 年1 月末日まで有効

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：

株式会社平和医療器械

山口県防府市戎町2丁目4番37号

TEL：0835-22-3658 FAX：0835-22-3678

製造業者：

Suzhou Ruiqi Medical Co.,Ltd.

(中華人民共和国)

Tonglu Youshi Medical Instrument Co.,Ltd.

(中華人民共和国)