

機械器具(51) 嘴管及び体液誘導管  
一般医療機器 吸引チューブ (JMDN: 16779000)

再使用禁止


## ヘイワカッピングサクシオンチューブ(未滅菌)

**【禁忌・禁止】**

- 再使用禁止 再滅菌禁止

**【形状、構造及び原理】**

## 1. 形状

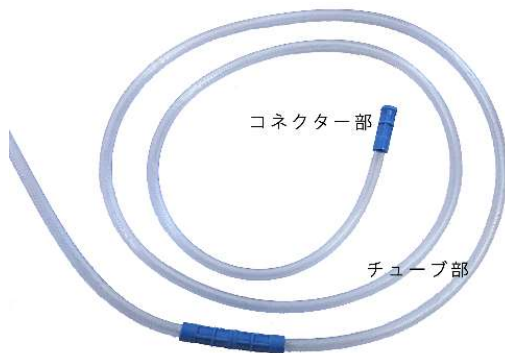

内径 6.5mm 全長 30mm  
1.8m ごとにカット可能

## 2. 構造及び原理

手術、処置等の際に使用する。コネクター部(または、嘴管部)、チューブ部より構成される。

## 3. 原材料

ポリ塩化ビニール

**【使用目的又は効果】**

吸引器等との接続に用いる、柔軟性の未滅菌のチューブである。

**【使用方法等】**

- 本品は Disposable 製品であるので、1 回限りの使用のみで再使用はできない。
- 包装より取り出し、必要な長さにカットして、吸引器等の接続口に接続する。
- 必要に応じて滅菌する。滅菌する場合は、必ずエチレンオキシドガス滅菌で行うこと。

**【使用上の注意】**

## 1. 重要な基本的注意

- 滅菌をする場合は、必ずエチレンオキシドガス滅菌で行うこと。
- 複数の患者には使用しないこと。
- 包装を開封したら、速やかに使用すること。
- 本品を折り曲げた状態、引っ張った状態で使用しないこと。

## 2. その他の注意事項

- 本品を吸引器等に接続するとき、ゆるみがないことを確認し、確実に接続すること。
- 本品を吸引器等に接続するとき、ゆるみがないことを確認し、確実に接続すること。
- 本品を必要な長さにカットする場合は、コネクターの中央部を切断すること。
- 接続部から液漏れ等の異常が認められた場合は、使用しないこと。

**【保管方法及び有効期間等】**

- 水濡れ、ほこり、高温多湿、直射日光を避け、室温保管すること。
- 有効期間は、包装の使用期限を参照してください。  
[自己認証(当社データ)による]

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者：

株式会社平和医療器械

山口県防府市戎町2丁目4番37号

TEL: 0835-22-3658 FAX: 0835-22-3678

製造業者：

Suzhou Ruiqi Medical Co., Ltd.

(中華人民共和国)

Tonglu Youshi Medical Instrument Co., Ltd.

(中華人民共和国)