

医療用品（3）手術用手袋及び指サック
一般医療機器 非天然ゴム製検査・検診用手袋（70976000）

再使用禁止

ヘイワニトリル手袋

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 本製品は未滅菌品です。
2. パウダーフリー
3. 左右同一型（平手タイプ）
4. 主原料：ニトリルゴム（NBR）
5. 色は写真にもものと異なる場合がある。



【保管方法及び使用期間等】

1. 水濡れに注意して保管すること。高温又は湿度の高い場所や、直射日光の当たる場所には保管しないこと。
2. オゾンを発生させる機器の近くを避け、出来るだけ箱包装のまま保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

株式会社平和医療器械

山口県防府市戎町2丁目4番37号

お問い合わせ窓口：TEL：0835-22-3658

製造業者

Anhui Intco Medical Products Co., Ltd.（中国）

【使用目的又は効果】

本製品は、手術を除いた検査、検診、治療行為及び汚染された医療材料を取り扱う場合、患者及び使用者を交差感染から守るために使用する。

【使用方法等】

箱より手袋を取り出し、手に装着して使用する。

【使用上の注意】

《重要な基本的注意》

1. 刃物等の鋭利な器具に触れると破れたり、穴があくことがあるので、注意すること。
2. 使用中に破損やピンホールなどの異常が認められた場合は、新しい製品に交換する。
3. 体質によって、かゆみ、かぶれ、発疹等を起こすことがあるので、異常を感じたら使用しないこと。

《相互作用（他の医薬品・医療機器等との併用に関すること）》

薬品、薬液等によって膨張したり、浸透したりする場合がありますので、確認して使用すること。