

機械器具（39）医療用鉗子  
一般医療機器 鉗子（JMDN：10861001）  
**内視鏡手術用鉗子 E8 シリーズ**

**再使用禁止**

**【禁忌・禁止】**

1. 再使用禁止、再滅菌禁止
2. 本製品を手術以外の目的で使用しないこと。

**【形状・構造及び原理】**

1. 形状・構造



※本セットは、エチレンオキサイド滅菌（EOG 滅菌）済

2. 原材料

材質 ステンレス鋼 SUS-420、ABS 樹脂

3. 原理

ハンドル部に手指を入れ開閉することによって先端把持部を動作させる。

**【使用目的又は効果】**

本製品は、手術用に使用する医療機器です。  
臓器、組織又は血管を把持、結合、圧迫又は支持するために用いる。

**【品目仕様等】**

外観と可動部の動きをチェックしてから使用してください。

**【使用方法等】**

内視鏡手術用に使用する。  
ハンドル部に手指をいれ、ハンドル部を開閉することにより、把持部を動作させ使用する。  
ラチェットのあるものは、把持した後ラチェットトリガ部を押しラチェットを利かせる。  
ラチェットのリリースは、再びラチェットトリガを押して行う。

**【使用上の注意】**

- ・再使用禁止、再滅菌禁止

**【保管方法及び有効期間等】**

- ・貯蔵、保管にあたっては、高温、多湿、直射日光の当たる場所また水ぬれは避け、室温で保管すること。
  - ・箱から取り出すときに包装に傷を付けたり、ピンホールを開けないように注意し、包装が破損したものは使用しないこと。
  - ・使用期限（滅菌期限）を遵守し、期限のすぎたものは、使用しないこと。
- 済みのものを貯蔵保管するにあたっては、再汚染を防ぐため清潔な場所に保管するとともに、有効保管期間を遵守すること。

**【包装】**

箱または袋入り

**【製造販売業者の氏名または名称及び住所】**

製造販売業者：

株式会社平和医療器械

山口県防府市戎町 2 丁目 4 番 37 号

TEL:0835-22-3658 FAX:0835-22-3678

製造業者：

チェンヤン ティアソン メディカル インstrument

ISO9002&YY/T0288 acquired CHINA