

2019年5月(第3版)

2018年11月(第2版)

機械器具 (51) 嘴管及び体液誘導管  
一般医療機器 吸引チューブ (JMDN：16779000)

## ヘイワサクシヨンチューブ

### 再使用禁止

#### 【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止 再滅菌禁止
- ・本製品を手術以外の目的で使用しないこと。

#### 【使用上の注意】

- 1)再使用及び再滅菌は、行わないこと。
- 2)包装が、破損または、汚損している場合には使用しないこと。

#### 【形状・構造及び原理等】

##### 1.形状

手術、処置等の際に使用する。コネクタ部(または、嘴管部)、チューブ部より構成される。



##### 2.原材料

ポリ塩化ビニール

##### 3.滅菌方法

エチレンオキシドガス滅菌 (EOG 滅菌) 済

#### 【使用目的又は効果】

本製品は、手術、処置等に使用する医療機器です。

吸引器と回収容器との接続に用いる。

#### 【使用方法等】

本品を滅菌包装より取り出し、コネクタ部を吸引器や吸引瓶または回収容器に接続する。他方を吸引し管、または、吸引が必要な機器などに取り付ける。吸引関係の機器以外には取り付けないこと。

#### 【保管方法及び有効期間等】

- 1)室温保管すること。
- 2)貯蔵保管するにあたっては、再汚染を防ぐため清潔な場所に保管すること。
- 3)直射日光及び火気を避け、湿気の少ない場所に保存のこと。
- 4)包装に、記載されている滅菌期限内に使用し、期限を経過したものは使用しないこと。
- 5)滅菌期限の表示の見方  
(例) EXP 202001 の場合  
西暦 2020 年 1 月末日まで有効。

#### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：

株式会社平和医療器械

山口県防府市戎町2丁目4番37号

TEL:0835-22-3658 FAX:0835-22-3678

製造業者：

Conod Medical CO.,LTD. (中華人民共和国)

コノド メディカル