

2020年1月(第1版)

機械器具(55)医療用洗浄器  
一般医療機器 内視鏡下灌流・吸引器 (JMDN:70465000)

## ホームポート吸引洗浄プローブセット

### 再使用禁止

#### 【警告】


1. 本品を洗浄用水バッグに刺入あるいは抜去する場合は、必ずクランプを留め、流れを防止した後行うこと。洗浄水が圧力で噴き出すことがある。
2. スパイクの先は鋭利なので手など傷つけないように十分注意すること。

#### 【禁忌・禁止】

再使用禁止 再滅菌禁止

#### 【形状・構造及び原理等】

##### 1. 形状、構造

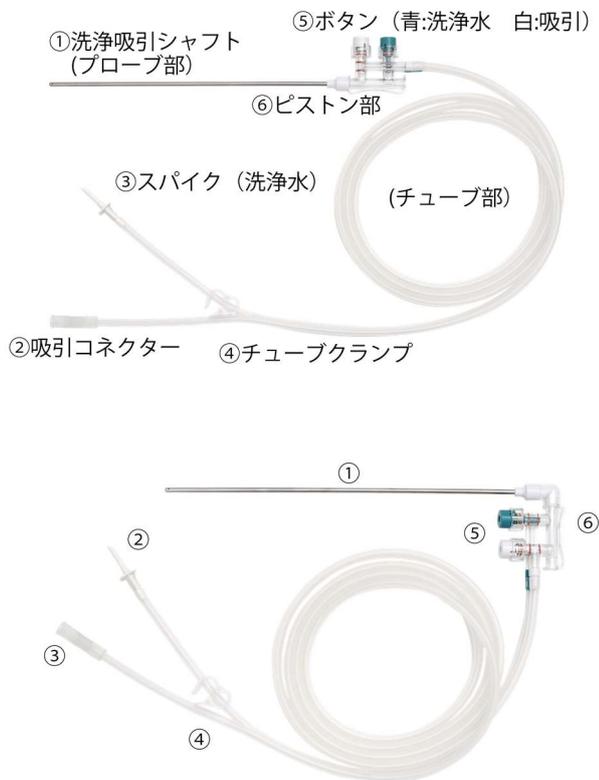

##### 2. 原材料

チューブ部:塩化ビニール、ピストン部:プラスチック  
プローブ部:ステンレス及びプラスチック

##### 3. 原理

本品のスパイクを洗浄水バッグ等に接続し、吸引コネクタを吸引器等に接続した後、洗浄吸引シャフトをトロッカー等より挿入し、術野の洗浄、吸引を行う。

#### 【使用目的又は効果】

手術の際に、術野を洗浄や吸引するために使用する。

#### 【使用方法等】

##### 1. 洗浄および吸引システムへの接続

- (1) 本品を滅菌包装より取り出し、異常がないか外観を確認する。
- (2) チューブクランプ④両方を留める(閉める)。
- (3) スパイク③を洗浄水バッグに保護キャップを取り接続する。
- (4) チューブクランプ④を開ける。

##### 2. 吸引への接続

吸引コネクタ②を吸引器に接続する。

##### 3. 使用方法

- (1) トロッカー等より、洗浄吸引シャフト①を挿入する
- (2) 洗浄水を出す場合は、青ボタンを押す。吸引の場合は白ボタンを押す。

#### 【使用上の注意】

- (1) 本書は、製品の添付文書であり、外科手術手技を解説するものではない。
- (2) 使用前、必ず本品の外観に異常がないかどうか確認すること。異常が認められた場合、使用を中止し、新しい本品を使用すること。
- (3) 洗浄水バッグにスパイクを接続する前は必ず両方のチューブクランプを留める(閉める)こと。洗浄水が噴き出し、術野を汚染する可能性がある。
- (4) 本品は、滅菌有効期限内であっても、包装が破損または開封していた場合は、製品の滅菌状態を保証できないので、使用しないこと。
- (5) 使用・未使用に関わらず、一旦開封した本品はすべて廃棄すること。

#### 【保管方法及び有効期間等】

##### 1. 貯蔵・保管方法

高温、多湿、直射日光および水濡れを避けて室温で保管すること。一時的に室温を超える場合であっても、54℃を超えないこと。包装材料に傷をつけたり、ピンホールを生じさせないように取り扱うこと。

製品に記載してある使用期限を必ず確認し、使用期限を過ぎたものは使用しないこと。

##### 2. 有効期間・使用の期限(外装表示を参照)

#### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者:

株式会社平和医療器械

山口県防府市戎町2丁目4番37号

TEL: 0835-22-3658 FAX: 0835-22-3678

製造業者:

Suzhou Homeport Medical Appliance Co., Ltd.

(中華人民共和国)

製造業者(滅菌):

SuZhou WJR Medical Technical Co., Ltd

(中華人民共和国)