

2024 年 3 月（第 4 版）
2023 年 9 月（第 3 版）

機械器具（51）嘴管及び体液誘導管
一般医療機器 吸引チューブ（JMDN：16779000）

再使用禁止

ヘイワカッティングサクションチューブ(未滅菌)


【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止 再滅菌禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

手術、処置等の際に使用する。コネクター部（または、嘴管部）、チューブ部より構成される。全長：30m

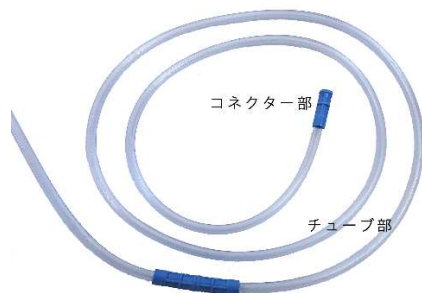

2. 原材料

ポリ塩化ビニール

【使用目的又は効果】

吸引器等との接続に用いる柔軟性のる未滅菌のチューブである。

【使用方法等】

本品は Disposable 製品であるので、1 回限りの使用のみで再使用できない。

包装より取り出し、必要な長さにカットして、吸引器等の接続口に接続する。

必要に応じて滅菌する。滅菌する場合は、必ずエチレンオキサイドガス滅菌で行うこと。

＜使用方法等に関する使用上の注意＞

1. 必要な長さにカットする場合は、コネクターの中央部を

切断すること。

2. 接続部から液漏れ等の異常が認められた場合は使用しないこと。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

1. 滅菌する場合は必ずエチレンオキサイドガス滅菌で行うこと。
2. 複数の患者には使用しないこと。
3. 包装を開封したら、速やかに使用すること。
4. 本品を折り曲げた状態、引っ張った状態で使用しないこと。

＜その他の注意＞

本品を吸引器等に接続するとき、ゆるみがないことを確認し、確実に接続すること。

【保管方法及び有効期間等】

保管の条件：水漏れに注意し、直射日光、オゾン及び高温多湿を避けて保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：

株式会社平和医療器械

山口県防府市戎町 2 丁目 4 番 37 号

製造業者：

Suzhou Ruiqi Medical Co., Ltd.

(中華人民共和国)

Tonglu Youshi Medical Instrument Co., Ltd.

(中華人民共和国)