

器具器械49 医療用穿刺器、穿削器、穿孔器
一般医療機器 歯科用カーバイドバー JMDN16668000

FG用カーバイドバーゼックリアタイプ

【警告】

本品は、マイクロモーターエンジンに装着使用のこと。
高速回転のエアータービンで使用すると破折して怪我を
する恐れがあるので装着使用しないこと。

*【形状・構造及び原理等】

形状

E015134100011 ・先端刃部径 0.8mm ・全長 FG23mm



E015124000011 ・先端刃部径 0.8mm ・全長 RA26mm



切削部：タングステンカーバイド製

軸 部：タングステンスチール製

軸 径：FG1.6mm RA2.35mm 刃部長：11mm

【使用目的又は効果】

埋伏智歯の抜歯前切断、破折根や分裂根の除去に用いる。そのほか
髓室初期開拓や歯肉レベルでのクラウンの水平方向切断に使用する。

最大回転数：100,000RPM

*【使用方法等】

用途に応じた形状を選び、ハンドピースに装着し使用する。

*【使用上の注意】

1. 回転軸正方向の圧力は100グラム以下のこと。
2. マイクロエンジンモーターに装着使用し、高速回転のエアータービンでは装着使用しないこと。
3. 発熱を避けるため充分な注水下で、フェザータッチで使用し強く押し付けて使用しないこと。
4. 切削時に突き、ひねり等の扱い、及び急激な回転数の変更はしないこと。
5. バーを確実にチャック内に挿入し、半チャックでないことを確認すること。
6. ハンドピースの偏心、振れ、ガタがないことを確認すること。
7. ハンドピースのチャック、軸受けの磨耗によるチャックのブレがないかを定期的に検査すること。
8. 予め口腔外で回転させ、バーの振れがないことを確認すること。
9. 先ず無負荷で回転させ、定常回転になってから使用すること。
10. 使用時には目の損傷防止のため、保護めがね等を使用すること。

*【保管方法及び有効期限等】

高温、多湿、水ぬれを避け、乾燥した状態で保管すること。

【取扱い上の注意】

1. 使用後は直ちに超音波洗浄、又は医療用洗剤とナイロンブラシ等を使用して洗浄し、生体組織などの付着物を洗い流すこと。
2. 廃棄する場合には、医療廃棄物として適切に処分すること。
3. オートクレーブ滅菌可能であるが、歯科小器具用の腐食防腐蚀剤（亜硝酸ナトリウム）の入った薬液を使用すること。また使用する薬液メーカーの取扱い説明書を遵守すること。
4. 塩素系、よう素系の消毒剤は錆びなど腐食の原因になるので使用しないこと。
5. オートクレーブ滅菌の際には、乾燥温度に注意すること。特に高温での乾燥は、金属疲労など本製品の性能劣化などの原因になることがあるので注意すること。

*【保守点検に係る事項】

本製品の使用前、使用後には、ヘッド部（刃部）の傷や欠け、シャンクの傷、曲がり、錆びなどの異常の有無を確認し、異常がある場合には使用しないこと。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：有限会社ベルデンタサプライ

住 所：〒657-0824

神戸市灘区福住通8-1-17

電 話：078-882-1257

製 造 業 者：有限会社ベルデンタサプライ

原 産 地 国：スイス