

歯科材料09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯面研磨材 JMDN:70904000
プロフィスシャインジェル

【警告】

- 本品又は本品に含まれる成分に対して、発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
- 本品の使用により発疹などの過敏症状があらわれた患者には使用を中止し、医師の診断を受けさせること。
- 万一目に入った場合には、すぐに大量の流水で洗浄し、眼科医の診断を受けさせること。

【禁忌・禁止】

- 本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
- 本品を【使用目的又は効果】に掲げた用途以外に使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

- 形状 ジェル状
- 組成
ポリエチレングリコール、ポリビニルピロリドン、グリセリン、無水ケイ酸、その他
- 原理
粘結成分（ポリビニルピロリドン）がタバコのヤニ等の着色汚れを吸着するとともに、研磨成分（無水ケイ酸）を研磨面に停留させ、物理的に研磨する。

【使用目的又は効果】

歯面の清掃及び研磨に用いる。

【使用方法等】

本品の適量を歯科用予防治療用ブラシ、研磨カップ等に塗布して研磨するか、応用部位に直接塗布して歯科用予防治療用ブラシ、研磨カップ等で研磨する。

【使用上の注意】

- 歯科用予防治療用ブラシ、研磨カップ等に適した使用回転数範囲に注意して使用すること。
- 使用する歯科用駆動装置及びハンドピース等についてはメーカーの取扱説明書の指示に従い正しく使用すること。
- 本品は乾燥すると残渣が落ちにくくなる場合があるので、使用後速やかに水で洗浄すること。
- 本品は液成分が分離する可能性があります、品質には問題がありません。

【保管方法及び有効期間等】

貯蔵・保管方法

- 水分、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避け、外圧（物理的負荷）及び汚染を受けないように保管すること。
- 高温・直射日光を避け、常温・常湿で保管すること。

- 本品は、歯科の従事者以外が触れないよう適切に保管・管理すること。

【主要文献及び文献請求先】

有限会社ベルデントサプライ
〒657-0824 神戸灘区福住通8丁目1番17号

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者
有限会社ベルデントサプライ
第3種医療機器製造販売業
〒657-0824 神戸灘区福住通8丁目1番17号

製造業者
スモカ歯磨株式会社
〒555-0012 大阪市西淀川区御幣島1丁目3番9号

発売元
株式会社ピーディーアール
*〒468-0015 愛知県名古屋市中天白区4-106
フリーダイヤル 0120-108394