

マンドレル

【形状・構造及び原理等】

形状



301LHP050 ISO 312104610415050

構造 スチール製

軸径2.35mmストレートハンドピース用

全長40mm

【使用目的又は効果】

研削・研磨剤を取付ける回転心棒シャフトとして用いる。

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

有限会社ベルデントサプライ

第3種医療機器製造販売業

〒657-0824 神戸灘区福住通8丁目1番17号

フリーダイヤル 0120-648790

製造業者

ヨタ社 (JOTA AG)

国名 スイス

【使用方法等】

本品を歯科用電動式ハンドピース、歯科用電気エンジン、マイクロモーターに装着し使用する。

【使用上の注意】

1. ハンドピースメーカーの指示に従って、シャンクを確実に奥まで挿入し、半チャックでないことを確認すること。
2. 使用する歯科用駆動装置及びハンドピース等については製造メーカーの取扱説明書の指示に従い正しく使用すること。
3. 使用前に必ず予備回転を行い、異常や軸の振れがないことを確認すること。
4. 正回転（右回転）で使用する。
5. 使用前に軸の変形、傷等、又ネジ部に変形、摩耗等のあるものは使用しないこと。
6. 目の損傷を防ぐためにゴーグル等の保護眼鏡を使用すること。
7. 本品を使用する際の研削、研磨時には、吸塵装置や防塵マスク等を使用すること。
8. 本製品はオートクレーブは可能であるが、歯科小器具用の腐食防腐剤（亜硝酸ナトリウム）の入った薬液を使用し、使用する薬液メーカーの取扱説明書を遵守すること。
9. その性質上、錆を生ずる場合があるので十分注意すること。特に塩素系消毒剤は金属腐食作用が強いので使用しないこと。
10. 廃棄する場合は医療廃棄物として適切に処理すること。

【保管方法及び有効期間等】

貯蔵・保管方法

1. 包装の破損や汚れがある場合は、使用しないこと。
2. 高温、多湿、水ぬれ、腐食性薬液及びその蒸気の暴露を避け乾燥した状態で保管すること。
3. 本品は、歯科従事者以外が触れないよう適切に保管、管理すること。

- * 添付文書を紛失された場合は弊社まで再度ご請求ください。
- * この添付文書記載の内容は改訂される場合があります。