

機械器具 74 医薬品注入器
一般医療機器 経腸栄養注入セット JMDNコード：70400000
栄養剤ボトル

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・ 再使用禁止
- ・ 未滅菌です。消毒後に使用してください。
- ・ オートクレーブ、放射線による滅菌はしないでください。（変形、変質の恐れがあります。）

【形状・構造及び原理等】



1) 各部の名称および成分 ＊＊

構成部名称	原材料
ゴム管	シリコーンゴム（φ8.0－φ5.5）
ストッパー	ばね鋼 SUS304
ゴム栓	シリコーンゴム

2) 製品構成

本製品には下記の種類がある。

品名	タイプ
栄養剤ボトル	ゴム管付
	ゴム栓付
	接続管なし

【使用目的、効能又は効果】

このプラスチック製栄養剤ボトルは、従来使用されているガラス製の栄養剤ボトルを使用した場合と比べて、破損事故等がなく、取扱が容易である。

本品は、デイスポーザブル製品である。

本品は、栄養用カテーテル（チューブ）を用いて、鼻腔等より医薬品等の栄養剤を注入する際の栄養剤の容器である。

【品目仕様】

本品の、容量は最大500ccである。

【操作方法又は使用方法等】

使用前に必ず、煮沸消毒を行ってください。

- (1) 調合 他の容器で成分栄養剤を調合します。
- (2) 運搬 ゴム管付は、クリップでチューブをはさみ栄養剤がもれないようにします。
本品に調合した栄養剤を入れ、ふたをして置く。
- (3) 接続 本品をガートルスタンドに吊り下げ、ゴム管又はゴム栓に患者の鼻腔チューブ（栄養チューブ）を接続します。
この時、鼻腔チューブ（栄養チューブ）と、ボトルとの間

に点滴量の調整が可能なクリップの付いたチューブを接続することをお勧めします。

- (4) 栄養用チューブ等のクリップを調整して流量を調整します。

【使用上の注意】

＊ 重要な基本的注意

- (1) 熟練した者以外は本品を使用しないこと
- (2) 本品はデイスポーザブル製品であるので、1回限りの使用で使い捨て、再使用しないこと。
- (3) 未滅菌です。煮沸消毒してから使用してください。
- (4) 接続する栄養用チューブの形状、構造等を添付文書等で確認して本品との接続の可否を確認してください。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 貯蔵・保管方法

- (1) 気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオウ分などを含んだ空気等により悪影響の生ずる恐れのない場所に保管すること。
- (2) 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。

2. 使用の期限

3年

【包装】

1個／袋 60個／箱

【製造業販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

1. 製造販売元

株式会社ベネフィット

〒399-4605 長野県上伊那郡箕輪町大字中曽根599

TEL0265-79-0030 FAX 0265-79-0282

2. 製造元

＊ 株式会社ベネフィット

＊