

類別：医 04 整形用品
一般医療機器 救急絆創膏(JMDN コード:34864000)

絆創膏 PR

再使用禁止

【禁忌・禁止】
再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

粘着テープに多層構造のシート材からなるパッドがついています。パッドは、傷口接触面である透過層、吸水性能を有する吸収層の 2 層からなり、更に、透過層は、メッシュシートと透過性シートで構成されています。
パッドと粘着テープを覆う形で剥離紙が付加されています。

2. 材質

パッド：ポリエチレン、ポリプロピレン、セルロース等
粘着テープ：ポレオレフィン、シリコーン・アクリル粘着剤
剥離紙：紙、シリコーン樹脂

3. 原理

パッドが傷口を覆い、保護します。パッドの傷口接触面となるメッシュシートは、全面に微細孔を有したセル構造をしており、傷口の乾燥やかさぶた形成の結果生じる本品と傷口との固着を防ぎます。また、過剰な浸出液（傷口から出る体液）等が生じる場合は吸収層で吸収し、正常な皮膚部での、浸出液によるふやけ等の皮膚障害を生じにくくします。
撥水性のある粘着テープは、パッドを傷口にしっかり固定し、また、皮膚から発散する水分を透過させるため、正常な皮膚がムレにくくなります。
パッドと粘着テープの粘着面を保護するため剥離紙がついていますが、使用時には容易にはがすことができます。

4. サイズバリエーション

製品名	サイズ(mm)	
	パッド	テープ
ふつうサイズ	12×23	19×72
ビッグサイズ	30×35	50×60

なり、密着性が損なわれますので、きれいに拭いてからご使用ください。

パット部分が濡れている、または汚れたまま放置すると傷の治りが悪くなりますので、新しい物に貼り替えてください。

お肌に異常がある時はご使用をお控えください。

小児に使用させる場合には、保護者指導のもとに使用させてください。

使用後はがすときは患部や周りの皮膚を痛めないようご注意の上、ゆっくりとはがしてください。

〔使用中または使用後の注意〕

本品の使用により発疹や発赤、かぶれ、かゆみ等の症状があらわれた場合は使用を中止し、医師または薬剤師にご相談ください。次の方は、使用前に必ず医師に相談してください。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

直射日光を避け、なるべく湿気の少ない、小児の手の届かないところに保管してください。

有効期間

使用期限：製品包装に記載（自己認証による）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

株式会社 H E L I O J A P A N

〒541-0053

大阪府大阪市中央区本町一丁目 2 番 2 号 4 F

電話：06-6266-1801

（9:30～16:45 土・日・祝日を除く）

【使用目的、又は効果】

傷の被覆及び保護

【使用方法等】

被覆してある両側の剥離紙を剥がし、パットにふれないように、パットを傷口に当て、粘着部分にて皮膚に固定してください。

【使用上の注意】

患部を清潔にし、粘着面が傷口につかないように使用してください。

使用を 1 回限りとし再使用はしないでください。

1 日に 2 回から 3 回貼り替えてください。

皮膚に水分や、クリーム、汚れが残っていると剥がれやすく