

2023年10月（第1版）
2024年5月（第2版）
2025年3月（第3版）

ご使用前に必ずこの文章をお読みください。

医療機器届出番号：14B3X10040000002

医療用品04 整形用品
一般医療機器 家庭用遠赤外線血行促進用衣 JMDNコード 71105001

ベネクス リカバリーウェアSD

【禁忌・禁止】

- 異常（かゆみ、かぶれなど）を感じた場合は、使用を中止すること。
- 湿疹、かぶれ、傷など皮膚に異常がある場合は使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

1.形状・構造

1. トップス 6570 スタンダードドライ+ ロングスリーブ クルーネック メンズ



size	M	L	XL	XXL
身長	165-175cm	170-180cm	175-185cm	175-185cm
胸囲	88-96cm	94-100cm	98-104cm	102-108cm

2. ボトムス 6571 スタンダードドライ+ ジョガーパンツ メンズ



size	M	L	XL	XXL
身長	165-175cm	170-180cm	175-185cm	175-185cm
ウエスト	75-81cm	79-85cm	83-89cm	87-93cm

3. トップス 6580 スタンダードドライ+ ロングスリーブ クルーネック レディース



size	M	L	XL
身長	154-164cm	159-169cm	159-169cm
胸囲	80-87cm	86-93cm	92-99cm

4. トップス 6581 スタンダードドライ+ ボートネック ロングスリーブ レディース




size	M	L	XL
身長	154-164cm	159-169cm	159-169cm
胸囲	80-87cm	86-93cm	92-99cm

5. ボトムス 6582 スタンダードドライ+ ジョガーパンツ レディース



size	M	L	XL
身長	154-164cm	159-169cm	159-169cm
ウエスト	61-67cm	66-72cm	71-77cm
ヒップ	87-95cm	92-100cm	97-105cm

6. ボトムス 6583 スタンダードドライ+ フレアパンツ レディース

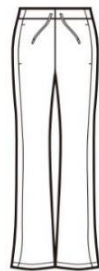

size	M	L	XL
身長	154-164cm	159-169cm	159-169cm
ウエスト	61-67cm	66-72cm	71-77cm
ヒップ	87-95cm	92-100cm	97-105cm

7. トップス 6572 スタンダードドライ+ ショートスリーブ メンズ



size	M	L	XL	XXL
身長	165-175cm	170-180cm	175-185cm	175-185cm
胸囲	88-96cm	94-100cm	98-104cm	102-108cm

8. ボトムス 6573 スタンダードドライ+ ハーフパンツ メンズ



size	M	L	XL	XXL
身長	165-175cm	170-180cm	175-185cm	175-185cm
ウエスト	75-81cm	79-85cm	83-89cm	87-93cm

9. トップス 6584 スタンダードドライ+ショートスリーブ レディース



size	M	L	XL
身長	154-164cm	159-169cm	159-169cm
胸囲	80-87cm	86-93cm	92-99cm

10. ボトムス 6585 スタンダードドライ+ ハーフパンツ レディース



size	M	L	XL
身長	154-164cm	159-169cm	159-169cm
ウエスト	61-67cm	66-72cm	71-77cm
ヒップ	87-95cm	92-100cm	97-105cm

2. 原理

本商品の繊維に含まれるDPV576粒子が体温の遠赤外線を輻射し、温熱治療を行う。

【使用目的又は効果】

本製品は疲労回復を目的として、休養時に着用可能である。
遠赤外線の血行促進効果により、次のような健康効能が期待できる。

- 血行促進
- 疲労回復
- 筋肉のコリ等の改善

【使用方法等】

- 上半身・下半身に適したものを、衣類として直接肌に着用する。
- 本製品は休養時、運動後、睡眠時に着用可能である。
- 本製品は再使用可能である。
- 睡眠時の着用は、発汗作用が高まるため、十分な水分補給を行う。

【使用上の注意】

- 着用中に身体に何らかの異常（かゆみ、かぶれなど）を感じた場合は、ただちに使用を中止すること。
- 湿疹、かぶれ、傷など皮膚に異常がある場合は使用しないこと。
- 本製品を洗濯する際は、洗濯絵表示に従って行うこと。
- 湿気や直射日光の影響や、長期の使用による経年劣化で伸びが生じる場合があるので注意すること。
- 長時間水に浸したり、濡れたまま重ねておくと、淡色部分や他のものに色移りする場合があるので注意すること。
- 漂白剤の使用は避けること。
- 乾燥機の使用は避けること。
- 鋭利なもの等で引っかけないように注意すること。

【保管方法及び有効期間等】

- 直射日光、水濡れ、高温、多湿な環境を避けて保管すること。
- しばらく使用しない時は一度干してから湿気のない場所で保管すること。

【耐用年数】

2年

【取り扱い上の注意】

- 本品は繰り返し使用可能ですが、素材の特性上、湿気や日光（紫外線）の影響を受けたり、長期の使用による経年劣化で伸びが生じたりする場合がありますのでご注意ください。

【包装】

1枚/袋

【製造販売業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社ベネクス
〒243-0018 神奈川県厚木市中町4-4-13 浅岡ビル4F
電話：046-200-9288

ご使用前に必ずこの文章をお読みください。