

2024年10月（第1版）  
2025年3月（第2版）

ご使用前に必ずこの文章をお読みください。

医療機器届出番号：14B3X10040000004

医療用品04 整形用品  
一般医療機器 家庭用遠赤外線血行促進用衣 JMDNコード 71105001

ベネクス リカバリーウェアD


【禁忌・禁止】

- 異常（かゆみ、かぶれなど）を感じた場合は、使用を中止すること。
- 湿疹、かぶれ、傷など皮膚に異常がある場合は使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

1.形状・構造

1. トップス 8500 リカバリーデイズ ロングスリーブ クルーネック メンズ

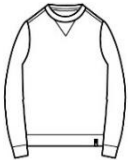


| size | M         | L         | XL        | XXL       |
|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 身長   | 165-175cm | 170-180cm | 175-185cm | 175-185cm |
| 胸囲   | 88-96cm   | 94-100cm  | 98-104cm  | 102-108cm |

2. ボトムス 8502 リカバリーデイズ ジョガーパンツ メンズ



| size | M         | L         | XL        | XXL       |
|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 身長   | 165-175cm | 170-180cm | 175-185cm | 175-185cm |
| ウエスト | 75-81cm   | 79-85cm   | 83-89cm   | 87-93cm   |

3. トップス 8503 リカバリーデイズ ショートスリーブポケットT メンズ

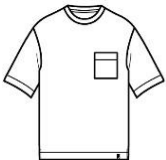

| size | M         | L         | XL        | XXL       |
|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 身長   | 165-175cm | 170-180cm | 175-185cm | 175-185cm |
| 胸囲   | 88-96cm   | 94-100cm  | 98-104cm  | 102-108cm |

4. トップス 8550 リカバリーデイズ ロングスリーブ レディース



| size | M         | L         | XL        |
|------|-----------|-----------|-----------|
| 身長   | 154-164cm | 159-169cm | 159-169cm |
| 胸囲   | 80-87cm   | 86-93cm   | 92-99cm   |

5. ボトムス 8552 リカバリーデイズ ジョガーパンツ レディース



| size | M         | L         | XL        |
|------|-----------|-----------|-----------|
| 身長   | 154-164cm | 159-169cm | 159-169cm |
| ウエスト | 61-67cm   | 66-72cm   | 71-77cm   |
| ヒップ  | 87-95cm   | 92-100cm  | 97-105cm  |

6. ボトムス 8504 リカバリーデイズ ハーフパンツ メンズ



| size | M         | L         | XL        | XXL       |
|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 身長   | 165-175cm | 170-180cm | 175-185cm | 175-185cm |
| ウエスト | 75-81cm   | 79-85cm   | 83-89cm   | 87-93cm   |

7. トップス 8553 リカバリーデイズ ショートスリーブTシャツ レディース



| size | M         | L         | XL        |
|------|-----------|-----------|-----------|
| 身長   | 154-164cm | 159-169cm | 159-169cm |
| 胸囲   | 80-87cm   | 86-93cm   | 92-99cm   |

## 2. 原理

本商品の繊維に含まれるDPV576粒子が体温の遠赤外線を輻射し、温熱治療を行う。

### 【使用目的又は効果】

本製品は疲労回復を目的として、休養時に着用可能である。

遠赤外線の血行促進効果により、次のような健康効能が期待できる。

- 血行促進
- 疲労回復
- 筋肉のコリ等の改善

### 【使用方法等】

- 上半身・下半身に適したものを、衣類として直接肌に着用する。
- 本製品は休養時、運動後、睡眠時に着用可能である。
- 本製品は再使用可能である。
- 睡眠時の着用は、発汗作用が高まるため、十分な水分補給を行う。

### 【使用上の注意】

- 着用中に身体に何らかの異常（かゆみ、かぶれなど）を感じた場合は、ただちに使用を中止すること。
- 湿疹、かぶれ、傷など皮膚に異常がある場合は使用しないこと。
- 本製品を洗濯する際は、洗濯絵表示に従って行うこと。
- 湿気や直射日光の影響や、長期の使用による経年劣化で伸びが生じる場合があるので注意すること。
- 長時間水に浸したり、濡れたまま重ねておくと、淡色部分や他のものに色移りする場合があるので注意すること。
- 漂白剤の使用は避けること。
- 乾燥機の使用は避けること。
- 鋭利なもの等で引っかけないように注意すること。

### 【保管方法及び有効期間等】

- 直射日光、水濡れ、高温、多湿な環境を避けて保管すること。
- しばらく使用しない時は一度干してから湿気のない場所で保管すること。

### 【耐用年数】

2年

### 【取り扱い上の注意】

- 本品は繰り返し使用可能ですが、素材の特性上、湿気や日光（紫外線）の影響を受けたり、長期の使用による経年劣化で伸びが生じたりする場合がありますのでご注意ください。

### 【包装】

1枚/袋

### 【製造販売業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社ベネクス

〒243-0018 神奈川県厚木市中町4-4-13 浅岡ビル4F

電話：046-200-9288

ご使用前に必ずこの文章をお読みください。