

2026年4月作成（第1版）

器25 医療用鏡

一般医療機器 歯鏡 JMDNコード：31776000


【シセキュア デンタルミラー】

【禁忌・禁止】

- ・本品は、本来の目的以外には使用しないこと。
- ・使用にあたっては、記載の注意事項を厳守すること。
- ・劣化、破損、変形など異常が認められた場合は、直ちに使用を中止すること。
- ・本製品の形状変更、改造、分解等を行わないこと。

【形状・構造及び原理】

本品は、ミラーヘッドとハンドルが一体となった構造のデンタルミラーである。

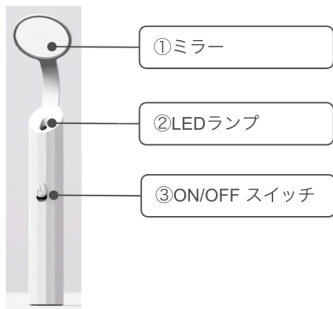

【使用目的又は効果】

本品は、口腔内診査又は圧排のために用いる歯科用器具である。

【使用方法】

- 1) 電池カバーを開け、LR44ボタン電池×3個を正しい向きに従って入れ、カバーを閉じてください。
- 2) ON/OFFスイッチでLEDランプを点灯させ、口腔内を反射鏡として使用します。
- 3) 使用後は、LEDランプを消灯し、清潔な状態でケースに収納してください。

【使用上の注意】

- 1) 包装の破損や製品の異常が認められた場合は、使用しないこと。
- 2) ミラー面が傷つく恐れがあるため、使用前に磨き粉、金属ウール、金属ブラシなどで表面を磨かないこと。曇った場合は、やわらかい布などで拭くこと。
- 3) 粗雑な取扱いは器具の寿命を著しく低下させるため避けること。

【保管方法及び有効期間等】

- 1) 直射日光・高温多湿を避け、清潔で乾燥した場所に保管すること。
- 2) 粉塵や化学製品を避け、清潔な場所に保管すること。
- 3) 保管中、損傷しないように注意すること。
- 4) お子様の手が届かない場所に保管すること。
- 5) 長時間使用しない場合は、電池を取り外すこと。

【製造販売業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：ペガサスブランディング株式会社
電話番号：03-4400-2704