


器06 呼吸補助器
 高度管理医療機器 新生児・小児用人工呼吸器(14361000)
**新生児・小児用人工呼吸器 Millennium (ミレニアム) のオプション
 スマートシンク**

再使用禁止

【禁忌・禁止】
 <使用方法>
 1) 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】
 <形状>

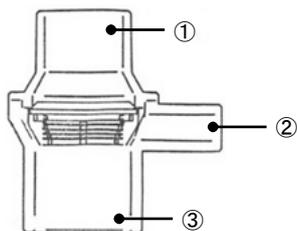

- ① 呼吸回路 (Yピース) 接続口
- ② 気道内圧測定チューブ接続口
- ③ 患者側接続口


【使用目的又は効果】

自分では十分な呼吸が出来ない患者を対象として、器械的に人工換気を行わせるために使用する新生児・小児用人工呼吸器 Millennium (ミレニアム) のオプション品である。小児及び新生児(未熟児を含む)に対して使用される。


【使用方法等】

[使用準備]

- 1) スプリングが適切な位置にあることを確認する。
- 2) フラッパーがバルブシートの同軸上にあることを確認する。

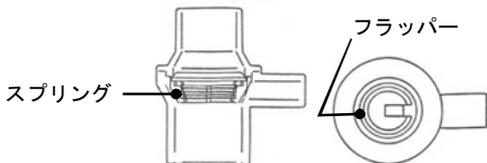

- 3) 人工呼吸器本体の使用方法に従い、患者回路と本品を接続する。

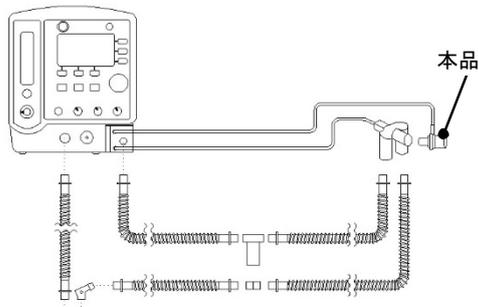

接続図

- 4) 人工呼吸器本体の使用方法に従い、使用前の点検を行う。

[使用中]
 1) 人工呼吸器本体の使用方法に従う。

[使用后]
 1) 患者回路から取り外し、廃棄する。

【使用上の注意】
 <重要な基本的注意>

- 1) 滅菌しないこと。
- 2) 気道内圧測定チューブに水滴が流入しないよう、チューブの差込口が常に上になるように設置すること。
- 3) 人工呼吸器本体のトリガー感度を設定する際には、必ず本品を接続すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：エア・ウォーター株式会社
 製造業者：Sechrist Industries Inc. (米国)

呼吸器本体の取扱説明書がありますので、必ず確認してください。