

器06 呼吸補助器
高度管理医療機器 新生児・小児用人工呼吸器 (14361000)
「インファントフローサイパップ」の付属品
トランスデューサーインターフェース、腹圧センサー

再使用禁止 (腹圧センサー)

* 【警告】

<使用方法>

- 1) 腹圧センサーを使用する場合は、連続的に SaO₂ のモニター及び本装置とは独立した換気回数のモニター及び無呼吸を検出する機器を併用すること。
[本装置のアラーム機能が機能しない等の非常事態に備える]

* 【禁忌・禁止】

<使用方法>

- 1) 腹圧センサーは再使用禁止

* 【形状・構造及び原理等】

<形状>

- 1) トランスデューサーインターフェース



- 2) 腹圧センサー (ディスプレイザブル品)



- | | |
|----------------------------|----------------|
| ① 腹圧センサーコネクタ | ④ センサー |
| ② インジケータ | ⑤ コネクタ (①部へ接続) |
| ③ コネクタ (インファントフローサイパップへ接続) | |

* 【使用目的又は効果】

本品は、患児の呼吸状態にあった換気療法として使用される小児用人工呼吸器、インファントフローサイパップに用いる付属品である。


* 【使用方法等】

[使用準備]

- 1) トランスデューサーインターフェースに腹圧センサーを接続し、トランスデューサーインターフェースのコネクタを、インファントフローサイパップ本体前面のコネクタに接続します。

呼吸器本体の取扱説明書がありますので、必ず確認してください。

- 2) センサーを指でやさしく圧迫し、トランスデューサーインターフェースのインジケータが点灯することを確認します。
- 3) センサーの固定に適したテープを下記の通りセンサーに貼ります。
①テープはセンサーのラインと直角に貼ります。
②センサーは臍部 (へそ) と胸骨剣状突起の中間に貼り付けます。
③腹部側面に配置することが必要な場合があります。

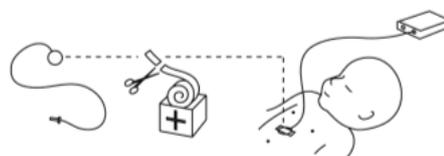

- 4) 腹圧センサーが正しく貼られていることを確認し、自発呼吸を観察します。

[使用中]

- 1) インファントフローサイパップの取扱説明書を参照し、定期的に点検を行ってください。

[使用后]

- 1) トランスデューサーインターフェース、腹圧センサーを取り外す。
- 2) 腹圧センサーは再使用せずに、廃棄する。

* 【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

- 1) 本品を患者に接続する前に必ず、インファントフローサイパップの使用前点検を実施すること。
- 2) 本体表面パネルの腹圧センサーの表示は、本体とトランスデューサーインターフェースとの接続状態を表示するもので、腹圧センサーの患者への装着状態やその正しい装着位置を示すものではないので注意すること。

* 【保守・点検に係る事項】

[使用者による保守点検事項]

- 1) 中性洗剤又は液体消毒剤を使って、トランスデューサーインターフェースの外表面を清拭する。

**

* 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

選任製造販売業者：エア・ウォーター株式会社
外国製造業者：Vyair Medical, Inc. (米国)