


## 機械器具 17 血液検査用器具

一般医療機器 血球計数装置(ヘマトクリット分析装置、ヘモグロビン分析装置) JMDNコード: 35476000

## 特定保守管理医療機器 自動血球計数装置 Microsemi LC-710

## 【形状・構造及び原理等】

## 1) 構造・構成ユニット

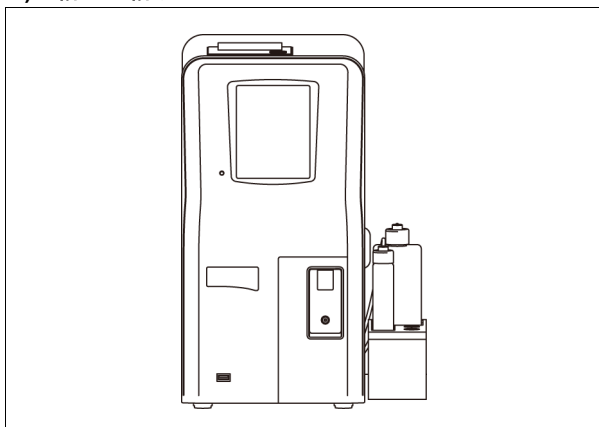

寸法	本体: 220(W) × 440(D) × 430(H) mm(突起部除く) 試薬ボトルホルダ: 75(W) × 200(D) × 70(H) mm(突起部除く)
本体質量	15 kg
電源	AC 100~240 V±10%、50/60 Hz
消費電力	85 VA
保護形式	クラス I 機器
電磁両立性規格	EN61326-2-6:2006に適合
測定対象	全血
検体量	10 µL
測定項目	WBC、LYM#、MON#、GRA#、RBC、Hgb、Hct、PLT
演算項目	MCV、MCH、MCHC、RDW、PDW、PCT、MPV、LYM%、MON%、GRA%
測定時間※	約1分
測定条件	周囲温度: 18~30°C 相対湿度: 25~85%(結露しないこと)
直線性	WBC: 0.5~120.0 × 10 <sup>3</sup> 個/µL
	RBC: 0.50~7.50 × 10 <sup>6</sup> 個/µL
	Hgb: 2.0~23.0 g/dL
	Hct: 5.0~65.0%
表示範囲	PLT: 10~999 × 10 <sup>3</sup> 個/µL
	WBC: 0.0~200.0 × 10 <sup>3</sup> 個/µL
	RBC: 0.00~10.00 × 10 <sup>6</sup> 個/µL
	Hgb: 0.0~25.0 g/dL
	Hct: 0.0~70.0%
	PLT: 0~2000 × 10 <sup>3</sup> 個/µL

再現性	WBC: 2.0%以下	(Control Normal Level)
	RBC: 1.5%以下	
	Hgb: 1.5%以下	
	Hct: 2.0%以下	
	PLT: 5.0%以下	

※: サンプルホルダカバー閉~次測定可能状態まで

## 2) 測定原理

## (1) 電気抵抗法

粒子の個数と体積計測を電氣的に行う方法です。

微細孔(アパーチャ)で隔てられた電極を持つ検出チャンバを電解質溶液で満たし、両電極間に定電流を流すと、この間の電気抵抗は電解質溶液の固定抵抗とアパーチャ内に存在する溶液によって決まります。

電解質溶液と異なる固定抵抗を持つ粒子を電解質溶液に分散し、この溶液をアパーチャを通して吸引すると、粒子がアパーチャ部を通過するとき粒子の体積分だけこの部分の電解質溶液が排除され、この間の電気抵抗が変化します。電極間に定電流を流すと、この変動を電圧パルスとして検出できます。この電圧パルス数を計測することによって粒子濃度を、また、この電圧パルス高が体積に比例することを利用して粒子サイズを、それぞれ計測できます。

## (2) 比色法(ノンシアン法)

溶血剤によって赤血球を破壊し、ヘモグロビンを希釈液中に溶出させます。溶出したヘモグロビンの吸光度を波長510 nmで測定し、あらかじめ記憶された検量線を用いてヘモグロビン濃度を求めます。

また、このヘモグロビン濃度、赤血球数、およびヘマトクリット値から、平均赤血球ヘモグロビン量と平均赤血球ヘモグロビン濃度を求めることもできます。

## 【使用目的又は効果】

血液中の有形成分(赤血球、白血球、血小板)を電気インピーダンスにより定量する自動の装置であり、規定量の血液中に存在する赤血球、白血球、血小板の絶対数の測定、赤血球指数の計算、三部の白血球分画細胞の計数を行います。また、血液試料中のヘマトクリット(赤血球の割合)を測定し、分光光度法により血液中のヘモグロビンを測定します。

取扱説明書を必ず参照してください

## 【使用方法等】

本製品の詳細な使用方法は付属の取扱説明書を参照してください。

### 1) 設置方法

1. 取扱説明書「3.2 設置条件」の記載に従って、適した場所に装置本体を設置します。
2. 各試薬と廃液容器を設置します。
3. プリンタ用紙をセットします。
4. 電源の接続を行います。
5. 各試薬の注入を行います。

### 2) 使用方法

1. 測定を始める前に、起動前点検を行い、装置本体を起動します。
2. コントロール血液で装置本体の精度が維持されていることを確認します。
3. 装置本体に適した抗凝固剤入りの採血容器に採血し、均一になるよう混和します。
4. 採血容器をサンプルホルダにセットした後、サンプルホルダカバーを閉めて測定を行います。
5. 1日の終わりには、終了洗浄を行います。

## 【使用上の注意】

### 1) 重要な基本的注意

- (1) 測定結果に基づく臨床診断は、臨床症状や他の結果などと併せて担当医師が総合的に判断してください。
- (2) 検体の採血容器に貼り付けるバーコードラベルの誤読、不読を防ぐため、バーコードラベルは規格どおりに作製したうえ、正しく採血容器に貼り付けてください。
- (3) 検体が装置本体に吸引されるよう、測定に十分な量の検体を用意してください。
- (4) 検体の採血容器は、採血容器本体に記載されている正確な量の血液で満たしてください。
- (5) 以下のような場合、血液検体中に凝血塊が生じ、正しい測定値が得られないことがあります。また、装置故障の原因となることがあります。
  - 検体の混和が不十分で不均一な場合
  - 採血に時間が長かかった場合
  - 不適切な採血によって組織液が混入した場合
  - 採血から検査までの時間が8時間を超えた場合
- (6) 必ず測定直前に検体を混和してください。混和から測定までに時間が経ってしまった場合は、測定前に再度混和してください。
- (7) 検体が泡立たないように混和してください。採血容器を強く振ると、血液中の成分が破壊されることがあります。
- (8) アルブミン濃度やグロブリン濃度が高い検体や血栓症治療などを行っている検体において、検体混和時に泡立ちやすいことがあります。このような場合は、混和後15～30秒静置した後、測定してください。
- (9) 本製品で検出された上下限フラグ、再現性フラグ、または粒度分布の異常に関するフラグについては、臨床病状を考慮したうえで適宜手法による検証を行ってください。
- (10) 特定の検体で\$フラグ、\*フラグが継続して発生する場合、検体に問題がある可能性があります。検体に凝集塊、フィブリンなどが含まれていないか確認してください。必要であれば、手法による確認を行ってください。
- (11) 検体の取り違いを防止するため、連続測定を行う前には、必ず目的の検体であることを確認してください。
- (12) 検体の採血容器の開口部に付着した血液は測定前に拭き取ってください。

- (13) 測定対象に適合したモードおよび機能で測定してください。間違ったモードや機能で測定すると、正しい結果が得られないことがあります。
  - (14) データの信頼性を確保するために、終了時には、必ず終了洗浄を行ってください。
  - (15) 試薬を直射日光に当てないでください。劣化のおそれがあります。
  - (16) 1週間以上使用しなかった本製品を使用する前には、異音やエラーの発生がなく、装置本体が安全かつ正常に動作することを必ず確認してください。
  - (17) 必ず廃液容器キャップを使用してください。廃液容器に廃液チューブを直接差し込むと、装置内部に圧力がかかり誤作動するおそれがあります。
  - (18) 廃液容器には廃液の液量検出機能がありますが、液量が廃液容器の半分以上になりましたら、取扱説明書の記載に従って廃棄してください。
  - (19) 装置本体が汚れたときは、取扱説明書の記載に従って清掃してください。この際、アルコール系消毒液や有機溶媒を含む液体を使用しないでください。装置損傷のおそれがあります。
- ### 2) 相互作用（他の医薬品・医療機器等との併用に関すること）

【併用注意】（併用に注意すること）

- (1) 抗凝固剤を使用する場合、血球計数ではEDTA 塩の使用が基本とされています。ヘパリンは白血球形態を変化させ、血小板を経時的に減少させます。
  - (2) 検体中に共存する化学物質（内因性代謝物、薬剤、抗凝固剤、防腐剤など）によって、臨床的に有意な干渉を受けることがあります。
  - (3) 正常細胞でも、化学療法を始めとする種々な治療を受けている場合には細胞膜抵抗が変化し、フラグ出現の可能性がります。
- ### 3) その他の注意
- (1) 本製品は、異常なノイズを発する装置が近くにない場所に設置してください。
  - (2) 本製品は、人血を対象としています。動物などの血液の測定は、正確なデータが得られないことがあります。また、測定部を汚し、以後の測定に影響を与えることがあります。
  - (3) 測定部の汚れによって、精度管理の結果がアッセイ値からはずれることがあります。その場合、特殊洗浄を行ってください。
  - (4) サンプルホルダには本製品に対応するサンプル容器だけを入れてください。
  - (5) 採血容器は奥まで差し込んでください。
  - (6) 測定画面に[温度]が表示されている状態でも測定できませんが、仕様の範囲からはずれた環境での測定であるため、表示される値は保証されません。
  - (7) 特に安定した結果を得るために、希釈液の温度を18～30℃に維持してください。

**取扱説明書を必ず参照してください**

## 【保管方法及び有効期間等】

### 1) 保管方法

- (1) 以下の条件で保管してください。  
周囲温度: -20 ~ 50°C  
相対湿度: 90%以下(結露しないこと)
- (2) ほこりを避けて保管してください。
- (3) 装置本体を3日~1週間使用しない場合、または1週間以上使用しない場合は、それぞれ取扱説明書の記載に従って、洗浄動作と保管を行ってください。

### 2) 耐用期間

使用開始(据付)後5年(自己認証(当社データ)による)定期的な保守点検の実施が必要です。場合によって、修理が必要となることもあります。

## 【保守・点検に係る事項】

本製品の保守作業に関する詳細は付属の取扱説明書を参照してください。

即効洗浄液を酸性物質と混合しないでください。即効洗浄液には、次亜塩素酸ナトリウムが含まれているため、酸性物質と混合すると有毒な塩素ガスが発生します。このガスを吸引すると死亡することがあります。

廃液にはアジ化ナトリウム、および生物学的残留物質が含まれています。摂取したり、吸引したり、皮膚または目などの粘膜に接したりしないでください。取り扱い時には、ゴム手袋や保護眼鏡などを着用してください。万一、触れた場合は、速やかに洗い流し、医師に相談してください。

なお、装置本体を1週間以上使用しない場合は、販売代理店に連絡してください。

### 1) 使用者による保守点検事項

#### (1) 毎日

起動前点検	毎日の装置本体起動前
精度管理測定	1日1回、検体測定前
終了洗浄	毎日の装置本体終了前

#### (2) 毎月

ファンのフィルタの清掃	1カ月に1回
-------------	--------

#### (3) 必要時

精度管理測定	自動校正後
終了洗浄	測定を3日以上行わない場合に2~3日に1回
ファンのフィルタの清掃	フィルタが汚れたとき
希釈液の交換	・希釈液の残量が少なくなったとき ・希釈液の使用期限が切れたとき
溶血剤の交換	・溶血剤の残量が少なくなったとき ・溶血剤の使用期限が切れたとき
洗浄液の交換	・洗浄液の残量が少なくなったとき ・洗浄液の使用期限が切れたとき
廃液処理	廃液容器の液量が半分以上になったとき
プリンタ用紙の交換	プリンタ用紙に交換マーク(赤色)が表示されたとき
装置本体の清掃	装置本体が汚れたとき
装置本体の休止	装置本体を3日以上使用しないとき
通常洗浄	ブランクエラー、再現性不良(測定結果に再現性フラグ(\$、*)が多く発生する)のとき
特殊洗浄	通常洗浄を行っても、ブランクエラー、再現性不良(測定結果に再現性フラグ(\$、*)が多く発生する)が解消されないとき

純水洗浄排出	装置本体を1週間以上使用しないときや、輸送、保管をするとき
試薬LOT 入力	初期起動時、純水洗浄排出後の初回起動時、または試薬交換後(試薬管理する場合のみ必要)
校正	装置本体の異常、試薬、コントロール血液の劣化などが無いにもかかわらず、精度管理測定の結果が連続してアッセイ値の許容範囲からはずれるとき
タッチスクリーン校正	タッチスクリーンの感知位置がずれているとき

## 2) 業者による保守点検事項

### A. 3ヵ月周期または1500検体測定ごと

清掃...

- ・装置内部
- ・プリンタカバー内部(掃除機による吸引清掃)

### B. 6ヵ月周期または3000検体測定ごと

圧力チェック

### C. 1年周期または6000検体測定ごと

シール交換...

- ・サンプリングノズルのリンスブロック(洗浄セル)

Hgbブランク調整

グリスアップ...

- ・キャリッジレール

### D. 2年周期または12000検体測定ごと

シール交換...

- ・3連定注器
- ・エアシリンジ

### E. 必要に応じて

シール交換...

- ・WBC/RBCチャンバ

部品交換...

- ・ファンのフィルタ

グリスアップ...

- ・エアシリンジのシール

特殊洗浄

## 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

### 1) 製造販売元

株式会社 堀場製作所

TEL 075-313-8121

### 2) 連絡先

製品に関する技術的なお問い合わせ、ご相談は下記へお願いします。

テクニカルコールセンター

フリーダイヤル 0120-889-742

受付時間: 9:00 ~ 17:30(祝祭日を除く月曜日~金曜日)

**取扱説明書を必ず参照してください**