

本体取扱説明書を必ず参照すること

5. 医師及び法的有資格者以外の方は、使用しないでください。
6. 機器を設置するときには、次の事項を注意すること。
 - (1) 気圧、温度、湿度、日光、ほこり、塩分、イオウ分などを含んだ空気などにより悪影響を生じるおそれのない場所に設置すること
 - (2) 傾斜、振動、衝撃（運搬時を含む）などの安定したところに設置すること
 - (3) 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に設置しないこと
 - (4) 冷たいところから暖かいところに移すと結露（水滴）が生じることがあり、故障の原因になるので自然乾燥させてから使用すること。
7. 使用する前に機器及び付属品に異常がないか点検を行なってください。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

保管方法 次の条件を満たしている環境下で保管してください。

(ア) 周囲温度 -10 ～ 60 ℃

(イ) 相対湿度 30 ～ 95 %

耐用期間 3年[自己認証（当社データ）による]

【保守・点検に係る事項】

1. 使用者による保守点検事項

・電源投入前

- (ア) ケーブルやプローブに突起やひび割れ、亀裂、剥離などの外見上の異常がないことを確認してください。
- (イ) ケーブル類やプローブが正しく本体に接続されていることを確認してください。
- (ウ) 本体に大きな衝撃を受けた跡等の外見上の異常がないことを確認してください。

・電源投入後

- ① Bモード画像に明らかに異常なノイズ、不連続な表示等がないことを確認してください。
- ② プローブの患者接触面が異常に熱くならないことを、手で触れて確認してください。

2. 業者による保守点検事項

使用者と被検者の安全確保と装置の性能維持のため、定期的な保守点検の実施を推奨します。保守点検を依頼される場合は、購入先までご連絡ください。

【包装】

一台単位で梱包

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者 : 本多電子株式会社

住所 : 〒441-3193

愛知県豊橋市大岩町小山塚 20

電話 : 0532-41-2511 (代表)

0532-41-2625 (メディカル事業部直通)

製造業者 : 本多電子株式会社

フィンガルリンク株式会社 花巻工場

販売業者（代理店）連絡先