

類別: 機械器具 25 医療用鏡

一般的名称: 内視鏡用送水タンク (36500042)


一般医療機器

ペンタックス 送水タンク OS-H3

【形状・構造及び原理等】

《形状・構造》

*型式: OS-H3

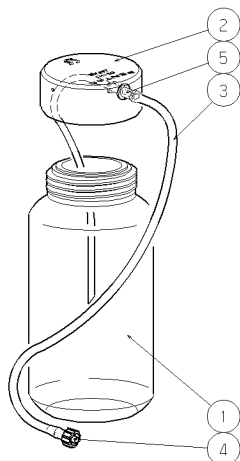

番号	部品名
①	タンク ** (ポリメチルペンテン)
②	キャップ
③	チューブ (シリコーンゴム)
④	ルアーコネクター (アクリル樹脂)
⑤	ニップル (ステンレス鋼)

《仕様》

タンク容量: 500ml

《原理等》

タンクに内に蓄えられた滅菌水は、チューブを通して接続した送水装置によって吸い上げられ、ルアーコネクターから内視鏡に給水され、その先端部から射出し、体腔内を洗浄します。

【使用目的又は効果】

内視鏡用の送水装置等に接続する送水用の貯水タンクです。

【使用方法等】

1. 使用前の準備及び点検
 - ・滅菌済みであることを確認して下さい。
 - ・外観を確認し、変形、ひび割れ、汚れ等、異常が疑われる場合は使用しないで下さい。
 - ・ペンタックスの送水装置SA-P2をご用意下さい。本送水タンクは、SA-P2以外の送水装置やプロセッサにはご使用できません。

せん。

- ・タンクに滅菌水を入れ、キャップを十分に締めます。
- ・チューブを送水装置のポンプに接続します。
- ・内視鏡、送水装置の取扱説明書に従って送水したとき、内視鏡先端部から水が射出すれば正常です。

2. 使用方法

- ・送水装置、内視鏡の取扱説明書に従って使用して下さい。

3. 使用後の手入れ

- ・キャップを取外し、タンク内に残った滅菌水を捨てて下さい。

- * 使用後、最低1日1回は、送水装置SA-P2の取扱説明書に従って再処理を実施して下さい。患者や内視鏡検査の状況により、更に頻繁に再処理して下さい。

《使用方法に関連する使用上の注意》

- ・使用前に、滅菌済みであることを確認して下さい。
- ・送水タンクに入れる水は、必ず滅菌水を使用して下さい。
- ・送水タンクの水は、毎日交換して下さい。
- ・送水タンクを逆さにしたり、強く押ししたりしないで下さい。[水があふれることがあります]
- ・感染防止のため、使用中及び使用後の手入れの際は、ゴム手袋、ゴーグルの装着等、適切な防御処置を講じて下さい。
- ・送水タンクを移動する時は、チューブやルアーコネクターを持たず、タンクを持って下さい。

【使用上の注意】

《重要な基本的注意》

- * 本製品は、未消毒、未滅菌状態で出荷されています。購入後は、使用前に、送水装置SA-P2の取扱説明書に従って適切な再処理を実施して下さい。
- ・本製品は、内視鏡検査に熟知した医師が、使用目的に合致していることを確認の上、医療施設内で使用して下さい。
- * 感染防止のため、送水タンクの使用後は、ゴム手袋、ゴーグル等を装着の上、洗浄及び滅菌を施して下さい。
- ・使用中に機器の異常を感じた場合は、安全に注意しながら、検査を中止するか、予備の送水タンクに交換して下さい。
- ・添付文書、及び取扱説明書では、使用前点検や使用後の手入れについて触れています。具体的な検査手技については、医学的に専門の立場から判断して下さい。
- ・【使用目的又は効果】に記載した目的以外には使用しないで下さい。
- ・分解、改造はしないで下さい。異常が疑われる場合は使用せず、当社まで連絡して下さい。

送水装置SA-P2の取扱説明書を必ず御参照下さい。

《不具合》

- ・本製品の使用により、以下の不具合事象が発生することがあります。
- *・不適切な再処理による送水タンク、キャップ、ホース、チューブ内の菌の残留

《有害事象》

- ・本製品の使用により、以下の有害事象が発生することがあります。
 - －送水タンクの、不適切な水による感染

【保管方法及び有効期間等】

《保管方法》

- ・乾燥した換気の良い清潔な室内に、室温で保管して下さい。
- ・下記の場所には保管しないで下さい。
 - －高温、多湿な場所、又は水のかかる恐れのある場所
 - －直射日光、通気、塩分、硫黄分、埃、その他、悪影響を与える恐れのある場所
 - －衝撃、振動に晒される場所

《有効期間等》

- ・本製品は、修理不可能な消耗品です。異常が疑われる場合は新品をお使い下さい。
- *・廃棄の際には、法に従って処理して下さい。

【保守・点検に係わる事項】

《洗浄、消毒／滅菌》

- *・送水タンク、キャップ、ホース、チューブは、送水装置S A－P 2の取扱説明書に基づき、適切な再処理を施して下さい。

《使用者による保守点検事項》

- ・使用前点検を行い、異常が疑われる場合は、使用しないで下さい。

《業者による保守点検事項》

- ・一年に1度、当社指定の専門家による定期点検を受けて下さい。

【包装】

1セット単位

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元

HOYA株式会社

電話番号：0422-70-3960（医用機器SBU 日本営業本部）