

類別: 機械器具 25 医療用鏡

一般の名称: 内視鏡用部品アダプタ 37090010

一般医療機器

ペンタックス ソフトウェアキット OS-I 6

【禁忌・禁止】

- ・「ビデオプロセッサ E P K-i」又は「ペンタックスビデオプロセッサ E P K-i」(以下、E P K-i という)以外には使用しないで下さい。
- ・本製品は、データ書き込み等には使用しないで下さい。

【形状・構造および原理等】

《形状・構造》

**型式: OS-I6



寸法(W×H×D)mm: 21.5×53.5×8.0 (コネクタ収納時)

質量: 10 g

《仕様》

追加する機能	Twin モード機能
	イメージサイズ設定機能
	USBプリンタの分割印刷機能
	拡大観察画像の保存機能
適用機器 (販売名)	ビデオプロセッサ E P K-i ペンタックス ビデオプロセッサ E P K-i

《原理等》

本製品はE P K-i の処理機能を拡張し、以下の機能を実現するためのソフトウェアキットです。

- ・Twin モード機能
画像処理を行うとき、処理前の画像と処理中の画像を同一画面に並べて表示する。
- ・イメージサイズ設定機能
画像表示サイズを切り替えて表示する。
- ・USBプリンタの分割印刷機能
一画像または複数の観察画像を同一紙面に並べて印刷する。
- ・拡大観察画像の保存機能
電子ズームにより拡大された観察画像を保存する。

【使用目的または効果】

本製品は、E P K-i に接続して、処理機能を拡張する機能拡張用パーツです。オプションの処理機能を拡張することにより、電子内視鏡を用いて観察、診断、治療を行なうための画像を提供します。

【使用方法等】

- ・E P K-i の電源を入れます。
- ・E P K-i 背面パネルのシリアルアウト端子に OS-I6 を挿入します。
- ・アップグレード用メニューに遷移します。
- ・アップグレード対象のファイルを選択し、アップグレードを実行します。
- ・E P K-i の電源を切ります。
 - アップグレード操作が終了しましたら、電源再投入後以降は追加機能を使用することが出来ます。
 - 上記のアップグレード作業は製造業者が行います。

【使用上の注意】

《使用注意》

- ・濡れた手で触らないで下さい。
- ・著しくほこりや粉塵の多い場所で使用しないで下さい。

《重要な基本的注意》

- ・【使用目的又は効果】に示した目的以外には使用しないで下さい。
- ・E P K-i の取扱説明書に基づいて、使用前点検を行なったE P K-i と組み合わせて使用して下さい、異常が疑われる場合は、使用しないで下さい。
- ・落下等、強い衝撃を受けた機器は、内部が故障している可能性があるため使用しないで下さい。
- ・分解、改造はしないで下さい。異常が疑われる場合、使用せず、当社まで連絡して下さい。
- ・画像処理機能が追加されたE P K-i を使用する場合、トーン強調機能を使用すると、通常の観察画像とは色調および明るさが異なります。十分に把握した上で使用して下さい。
- ・本製品を廃棄する場合は、法規制に従って廃棄して下さい。

【保管方法及び有効期間等】

◀保管方法▶

- ・乾燥した換気の良い清潔な室内に、室温で保管して下さい。
- ・下記の場所には保管しないで下さい。
 - 高温、多湿な場所、又は水のかかる恐れのある場所
 - 直射日光、通気、塩分、硫黄分、埃、磁気、静電気、
その他、機器に悪影響を与える恐れのある場所
 - 可燃性、爆発性のある気体や化学物質のある場所
 - 衝撃、振動に晒される場所

◀有効期間等▶

- ・本製品の有効使用期間は、適切な条件で使用、保管された場合、製造出荷後6年です。(自社基準)

【包装】

1セット単位

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元

H O Y A 株式会社

電話番号：0422-70-3960（医用機器 SBU 日本営業本部）