

類別:機械器具 25 医療用鏡
一般の名称:自然開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 38819001
*一般医療機器

PENTAX Medical 内視鏡用生検鉗子 VDK-FB

再使用禁止

*【禁忌・禁止】

*《使用方法》


- 1 再使用・再滅菌禁止。

*【形状・構造及び原理等】

*《形状・構造》

本製品には以下の型式がある。

| モデル名 | 有効長 | 挿入部最大径 |
|-----------------------|---------|---------|
| VDK-FB-18-105-O-P-B1P | 1050 mm | 1.95 mm |
| VDK-FB-18-105-O-P-A1P | | |
| VDK-FB-18-160-O-P-B1P | 1600 mm | 2.5 mm |
| VDK-FB-18-160-O-P-A1P | | |
| VDK-FB-23-160-O-P-B1P | | |
| VDK-FB-23-160-W-P-A1P | | |
| VDK-FB-23-160-O-P-A1P | 2300 mm | 2.5 mm |
| VDK-FB-23-230-O-P-A1P | | |
| VDK-FB-23-230-W-P-A1P | | |

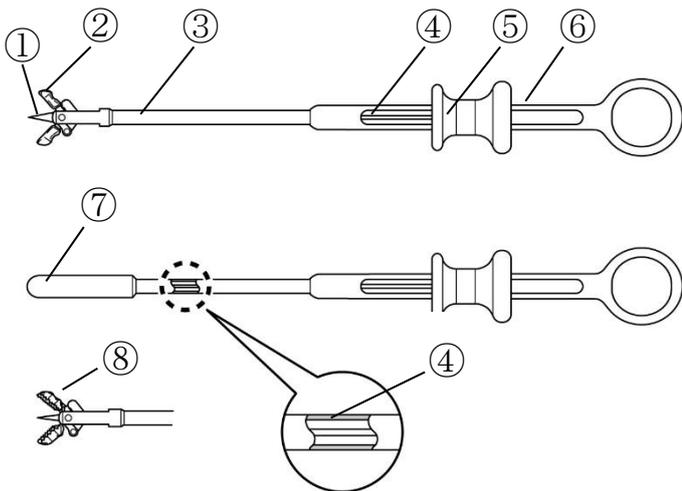

| No. | 名称 | No. | 名称 |
|-----|-------|-----|--------|
| ① | 針 | ⑤ | スライダ |
| ② | カップ部 | ⑥ | ハンドル |
| ③ | 挿入部 | ⑦ | 保護キャップ |
| ④ | 操作ワイヤ | ⑧ | 鱈口カップ |

主な材料

ステンレス鋼、ポリエチレン

*《原理等》

スライダを前後し、先端のカップを開閉することで生体組織の採取を行う。

*【使用目的又は効果】

内視鏡を介して、生体組織の採取を行う。

*【使用方法等】

- 1 使用前の準備及び点検
 - (1) 取扱説明書に従って異常がないことを確認する。
- 2 使用方法
 - (1) 内視鏡を真っ直ぐな状態にしカップ部を閉じた状態で、ゆっくり挿入する。
 - (2) スライダを前後させることで生体組織を採取する。
 - (3) 内視鏡からゆっくり引き抜く。

*《使用方法等に関する使用上の注意》

組み合わせて使用する内視鏡については、取扱説明書を参照すること。

- 1 先端部は、内視鏡から出た後、常に内視鏡視野内に確保すること。
- 2 内視鏡から引き抜く際は、患者の体液等の逆流・飛散に注意すること。

*【使用上の注意】

*《重要な基本的注意》

- 1 滅菌状態を確保するため、使用直前に開封すること。
- 2 不測の事態に備え事前に予備品を用意すること。

*《不具合・有害事象》

その他の不具合

- ・ カップの開閉不良、体内への欠落、落下

重大な有害事象

- ・ 穿孔
- ・ 裂傷
- ・ 出血
- ・ 感染
- ・

*【保管方法及び有効期間等】

*《保管方法》

- 1 水漏れに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて、清潔な場所で保管すること。

*《有効期間》

- 1 滅菌有効期限は滅菌袋に表示している[自己認証(自社データ)による]。期限切れのものは使用しないこと。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元

HOYA 株式会社

電話番号:0422-70-3960(医用機器SBU 日本営業本部)

**製造業者:

Jiangsu Vedkang Medical Science and Technology Co., Ltd (中国)

取扱説明書を必ずご参照下さい。