

類別:機 械 器 具 25 医 療 用 鏡  
一般の名称:自然開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 38819001  
\*一般医療機器

**PENTAX Medical 内視鏡用把持鉗子 VDK-FG**

再使用禁止

**\*【禁忌・禁止】**

**\*《使用方法》**


1 再使用・再滅菌禁止。

**\*【形状・構造及び原理等】**

**\*《形状・構造》**

本製品には以下の型式がある。

モデル名	有効長	挿入部最大径
VDK-FG-18-70-A4P	700 mm	1.95 mm

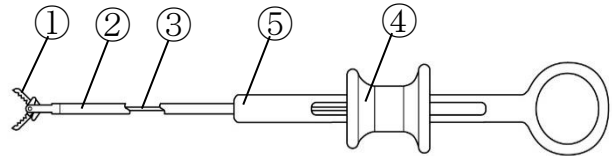

No	名称
①	カップ部
②	挿入部
③	操作ワイヤ
④	スライダ
⑤	ハンドル

**主な材料**

ステンレス鋼、ポリエチレン

**\*《原理等》**

スライダを前後させ先端のカップを開閉することで生体組織の回収、異物の除去を行う。

**\*【使用目的又は効果】**

内視鏡を介して、生体組織の回収、異物の除去を行う。

**\*【使用方法等】**

- 使用前の準備及び点検
  - 取扱説明書に従って異常がないことを確認する。
- 使用方法
  - 内視鏡を真っ直ぐな状態にし、カップ部を閉じた状態で、ゆっくり挿入する。
  - スライダを前後させ生体組織の回収、異物の除去を行う。
  - 内視鏡からゆっくり引き抜く。

**\*《使用方法等に関連する使用上の注意》**

- 組み合わせて使用する内視鏡については、取扱説明書を参照すること。
- 先端部は、内視鏡から出た後、常に内視鏡視野内に確保すること。
  - 内視鏡から引き抜く際は、患者の体液等の逆流・飛散に注意すること。

**\*【使用上の注意】**

**\*《重要な基本的注意》**

- 滅菌状態を確保するため、使用直前に開封すること。
- 不測の事態に備え事前に予備品を用意すること。

**\*《不具合・有害事象》**

**その他の不具合**

- カップの開閉不良、体内への欠落、落下

**重大な有害事象**

- 穿孔
- 裂傷

- 出血
- 感染

**\*【保管方法及び有効期間等】**

**\*《保管方法》**

- 水漏れに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて、清潔な場所で保管すること。

**\*《有効期間》**

- 滅菌有効期限は滅菌袋に表示している[自己認証(自社データ)による]。期限切れのものは使用しないこと。

**\*\*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売元  
HOYA 株式会社  
電話番号:0422-70-3960(医用機器 SBU 日本営業本部)

**\*\*製造業者:**

Jiangsu Vedkang Medical Science and Technology Co., Ltd (中国)

取扱説明書を必ずご参照下さい。