

機械器具（58）整形用機械器具
一般医療機器 骨手術用器械 70962001

HOMS スクリュー抜去用手術器械 （スクリュー抜去セット R）

【警告】

本手術器械は未滅菌のため、[保守・点検に係る事項]に定める方法で、使用前に必ず滅菌を行い、使用後は必ず洗浄・滅菌を行い、清潔に保管すること。

【禁忌・禁止】

[併用医療機器]

当製造販売業者製の骨折部固定内副子材料以外の骨接合手術に使用しないこと。（「相互作用」の項参照）

【形状・構造及び原理等】

1. 組成


ステンレススチール

2. 形状・構造・原理


本品は骨接合手術に用いる手動式手術用器械セットであり、インプラントの抜去等を行います。

尚、本手術器械の製品名、カタログ番号については、包装表示ラベル又は製品本体に記載されていますのでご確認ください。

- ☐ Cat. No. HS04-2901
製品名：T ハンドル（S）

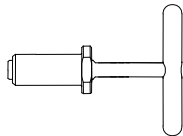

- ☐ Cat. No. HS06-1820
製品名：スクリュー抜去用プライヤー

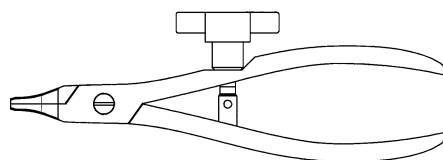

《スクリュースレッド 2.7mm～3.0mm 用》

- ☐ Cat. No. HS06-2310
製品名：ハローリーマー2.7mm～3.0mm スレッド用



- ☐ Cat. No. HS06-2610
製品名：摘出ボルト 2.7mm～3.0mm スレッド用




《スクリュースレッド 3.5mm～4.0mm 用》

- ☐ Cat. No. HS06-2410
製品名：ハローリーマー3.5mm～4.0mm スレッド用




- ☐ Cat. No. HS06-2710
製品名：摘出ボルト 3.5mm～4.0mm スレッド用

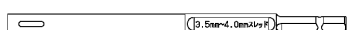


《スクリュースレッド 4.5mm～5.0mm 用》

- ☐ Cat. No. HS06-2510
製品名：ハローリーマー4.5mm～5.0mm スレッド用

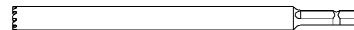


- ☐ Cat. No. HS06-2810
製品名：摘出ボルト 4.5mm～5.0mm スレッド用

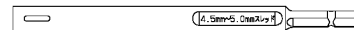

《4.0CCS/3.5 コーティカルスクリュー
／4.0 キャンセラスクリュー用》


- ☐ Cat. No. HS06-0100
製品名：イージーアウト（L）

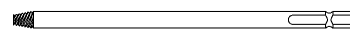

- ☐ Cat. No. HS06-0200
製品名：ハローリーマーL



- ☐ Cat. No. HS06-4100
製品名：摘出ボルトφ6 スクリューヘッド用

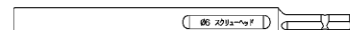

・適用ドリル

Cat. No. HS06-3007S 製品名：3.0 超硬ドリル

Cat. No. HS06-4007S 製品名：4.0 超硬ドリル

Cat. No. HS06-5007S 製品名：5.0 超硬ドリル

【使用目的又は効果】

骨接合手術等の骨手術に用いる手術器械をいう。手動式のものに限る。本品は再使用可能である。

【使用方法等】

1. 使用前

本手術器械は未滅菌のため、手術前に予め[保守・点検に係る事項]に示す条件にて滅菌を施して下さい。

2. 使用時（使用例）

本品はスクリュー抜去難症例対応品です。

2-1. ロッキングスクリュー抜去例

- 1) ロッキングスクリューがロッキングプレートから抜去できない場合は、超硬ドリルを右回転させ、スクリューヘッドを切削します。（図 1）
プレート下面までドリリングし、スクリューとプレートを分離します。（図 2）
- 2) スクリュー抜去用プライヤーの締付ハンドルを開き、プライヤー先端でスクリューを把持します。その後、締付ハンドルを確実に締め付けた状態でプライヤー全体を左回転させ、スクリューの残存片を抜去します。（図 3）
プライヤーで抜去できない場合は、2-3 の手順で抜去を行って下さい。

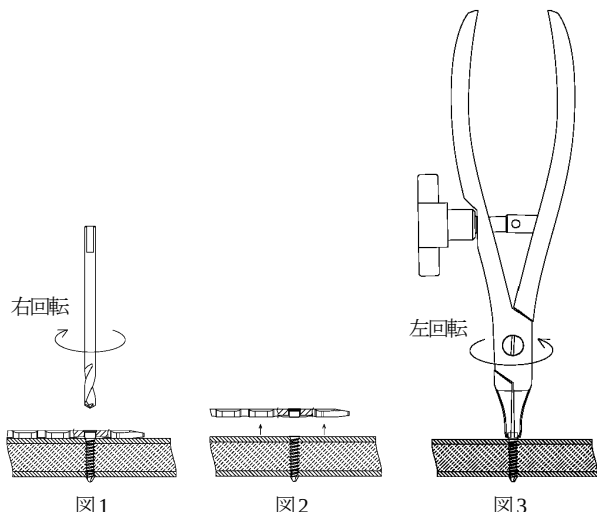


図 1

図 2

図 3

2-2. 40CCS/3.5 ロッキングスクリュー

／4.0 キャンセラススクリュー抜去例

- 1) スクリューのヘッドドライブがなめている場合は、イージーアウトをヘッドドライブに差し込み、左回転させて抜去します。(図 4)

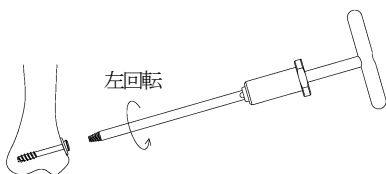


図 4

- 2) イージーアウトで抜去できない場合は、スクリュー抜去用プライヤーで抜去するか(図 5-1)、摘出ボルトφ6 スクリューヘッド用をスクリューヘッドに押し当てながら左回転させてスクリューに噛み合わせ、そのまま左回転にてスクリューを抜去します(図 5-2)。

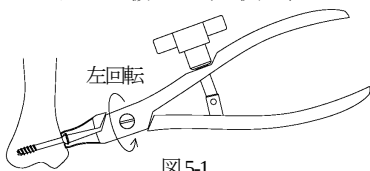


図 5-1



図 5-2

スクリューヘッドが骨に埋まっている場合は、事前にハローリーマーを左回転させ、スクリューヘッドが露出するまで削ります。(図 6)

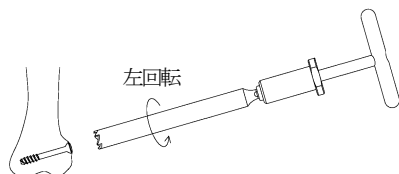


図 6

- 3) 抜去中、40CCS のスクリューヘッドが折損してしまった場合は、ハローリーマー3.5～4.0mm スレッド用でスクリュー周囲全域の骨を削ってスクリューを取り除いて下さい。(図 7)

3.5 コーティカルスクリュー／4.0 キャンセラススクリューのスクリューヘッドが折損した場合は、2-3 の手順で抜去を行って下さい。

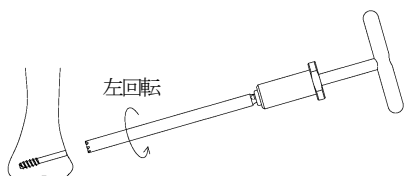


図 7

2-3. 骨内に残存しているスクリュー片の摘出例

- 1) ハローリーマーを左回転させ、スクリュー周囲の骨を深さ 5mm 以上となるよう削ります。(図 8)
- 2) 摘出ボルトをスクリューに押し当てながら左回転させ、スクリューに噛み合わせます。そのまま左回転にてスクリューを抜去します。(図 9)

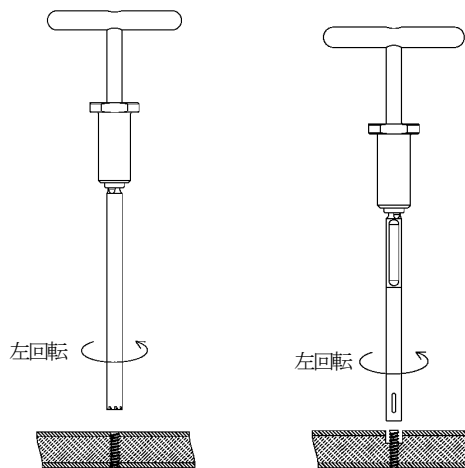


図 8

図 9

3. 使用後

使用後は、水ですすぎを完全に行い、[保守・点検に係る事項] に定める滅菌方法にて滅菌を行います。

4. 使用方法等に関連する使用上の注意

- 1) 使用前に必要な手術器械が揃っているか確認して下さい。
- 2) 刃物類は破損を及ぼすような過剰な負荷をかけないように適切に使用して下さい。
- 3) 損傷、磨耗、曲がり等が見受けられる器具は、絶対に使用しないで下さい。
- 4) 中空内に骨屑片が集積しないよう、中空構造を持つ器具はこれを術中に除去しながら使用して下さい。
- 5) ハローリーマーはスクリューに対して軸直に使用して下さい。挿入後、傾けて操作するとハローリーマーの先端部が破損する恐れがあります。
- 6) 摘出ボルトでのスクリュー抜去の際に、パワーツールは使用しないで下さい。
- 7) 切削時、周囲にインプラントの切削粉が飛散します。術野を適切に保護し、吸引除去しながら使用して下さい。
- 8) 抜去する際は、製品／抜去器具に無理な力が伝わらないよう慎重に使用して下さい。
[過度の負荷により、製品／抜去器具が破損する恐れがあります。]
- 9) 抜去の際は専用の手術器具を正しく接続するとともに、周囲の神経や血管を損傷させないよう、イメージインテンシファイヤー(X線透視)で確認しながら、慎重に行ってください。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 1) 刃の摩耗やキズ、曲がり等が激しい刃物類は、破損する恐れがあるので、絶対に使用しないで下さい。
- 2) 先端の変形や摩耗が激しい回転工具は破損する恐れがあるので、絶対に使用しないで下さい。
- 3) 使用後は隙間部分、内管及び中空部分や複雑な構造を有する部分に血塊等が残らないよう速やかに洗浄後滅菌して下さい。(「保守・点検に係る事項」参照)
[嵌合部等にある血塊や異物を除去しきれない恐れがあります。]

2. 相互作用(他の医療機器等との併用に関すること)

- 1) 併用禁忌(併用しないこと)

医療機器の名称等	臨床症状・処置方法	機序・危険因子
製造販売業者製以外の骨折部固定内副子材料	インプラントの緩み、破損の危険性が高まる恐れがある。	インプラントが適切に埋入できないため固定力等が不足する。
当製造業者製以外の手術用機械器具	手術用機械器具の不具合による危険性が高まる恐れがある。	手術用機械器具の操作が正しく機能しない。

3. 不具合・有害事象

本製品の使用において、患者の状態、骨折部の形態及び骨癒合の状態などにより次のような不具合・有害事象がまれに現れることがあるので、異常が認められた場合は直ちに適切な処置を施して下さい。

- 1) 重大な不具合
 - ・製品の破損、破損片の体内遺残
- 2) 重大な有害事象
 - ・偽関節、変形骨癒合、再骨折（術中／術後）
 - ・二次骨折
 - ・インプラントの脱転
 - ・感染症、血栓症
 - ・骨の短縮、骨壊死、骨密度の低下
 - ・金属アレルギー、異物アレルギー
 - ・手術における神経的損傷、血管損傷及び穿孔時発熱障害
- 3) その他の不具合
 - ・挿入／抜去時の製品／器具の破損
 - ・術後のインプラントの緩み
- 4) その他の有害事象
 - ・痛みや不快感、異物感
 - ・骨癒合不全
 - ・血行再生障害
 - ・挿入／抜去時における破損器具の体内遺残

4. 高齢者への適用

一般的に高齢者は骨量・骨質が十分でないことが多いので、本製品の使用は慎重に行い、術後の経過にも十分注意して下さい。

【保管方法及び有効期間等】

- 1) 保管方法
直射日光及び高温多湿を避け保管して下さい。

【保守・点検に係る事項】

【使用者による保守点検事項】

1. 使用前

- 1) 本手術器械は未滅菌のため、手術前に予め次に示す条件にて滅菌を施して下さい。
 - ・滅菌方法及び滅菌条件（オートクレーブ滅菌）

熱 源	水蒸気	
処 理 圧 力	118 kPa	196 kPa
処 理 温 度	121 ℃	132 ℃
処 理 時 間	20 分以上	5～10 分

- 2) 製品を使用する前に摩耗、キズ、割れ、有害なバリ、錆、接合の不良等がないか、外観検査を実施して下さい。

2. 使用後

- 1) 使用後は、速やかに洗浄を行い、血塊等を除去し、使用前の欄に示す「滅菌方法及び滅菌条件」で滅菌を行い保管して下さい。
- 2) 洗浄中又は洗浄後の製品を放置すると錆び等が発生する恐れがありますのでむやみに放置しないで下さい。
- 3) 洗浄剤は、医療用中性洗剤等の専用の洗剤を用い、適正な濃度で使用して下さい。（洗剤の使用説明を参照して下さい。）
- 4) 強アルカリ／強酸・生洗剤・消毒剤は器具を腐食させる恐れがあるので、使用を避けて下さい。やむを得ず使用する際は、製品の状態を確認し腐食等が発生しないよう洗浄して下さい。
- 5) 洗浄の際、製品の表面等にキズがつかないようブラシ、スポンジ等を使用し、金属製たわし、クレンザー（磨き粉）等の使用は避けて下さい。
- 6) 隙間部分や中空穴を有する製品はブラシ等で隙間部分や中空穴部分を入念に洗浄し異物を除去し、洗浄後の製品に異物がないことを十分確認して下さい。
- 7) 可動部を有するものは可動部分を操作しながら洗浄して下さい。
- 8) 分解可能なものや組み合わせて使用するものは最小単位まで分解し洗浄を行って下さい。
- 9) ブラシ等で血塊等を除去できない場合は隙間部分等を血液溶解剤又は蛋白分解酵素剤等を用いて洗浄後、超音波洗浄機を用いて洗浄し、滅菌して下さい。特に隙間部分は異物が残りやすいので、異物がないことを十分確認して下さい。
- 10) 血液溶解剤又は蛋白分解酵素剤等の薬剤を使用する場合は取扱説明書を参照の上使用して下さい。

- 11) 超音波洗浄機を使用する場合は、取扱説明書を参照の上使用し、製品に異物等がなくなるまで洗浄して下さい。
- 12) 超音波洗浄機を使用する際は、ドリル等の刃物が接触し、キズ等が発生しないよう注意して洗浄して下さい。
- 13) 合成樹脂が使用されている製品に高圧蒸気滅菌を行う場合、合成樹脂部分が滅菌トレー又は滅菌用金網容器等の金属部分に直接触れないようにして下さい。
- 14) 洗浄、滅菌後可動部分を有する製品がスムーズに可動しない場合は、必要に応じ水溶性潤滑剤または流動パラフィンを塗布して下さい。水溶性潤滑剤又は流動パラフィンを使用する場合は取扱説明書を参照の上使用して下さい。
- 15) 洗浄後は、水ですすぎを完全に行い、腐食防止のために、直ちに乾燥させて下さい。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

株式会社 ホムズ技研

〒391-0213 長野県茅野市豊平 4734-352

電話番号 0266-76-5881

製造業者

株式会社 ホムズ技研