

医51 医療用嘴管及び体液誘導管

16779000 吸引チューブ

一般医療機器

## 接続チューブ PT (未滅菌)

再使用禁止

### 【禁忌・禁止】


・再使用禁止

<使用方法>

・本品を吸引器と回収容器以外での組み合わせにて使用しないこと。[本品が正しく機能しない可能性があるため。]

### 【形状・構造及び原理等】

<代表図>

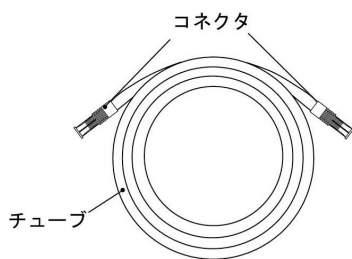

### 【使用目的又は効果】

・吸引器と回収容器との接続に用いる柔軟性のあるプラスチック製のチューブをいう。

### 【使用方法等】

・医師の判断にて適宜使用してください。

<操作方法>

◎使用前の準備事項

① 必要に応じて、手袋を着用してください。

② 使用前には、接続する器具の径と本品の径を必ず確認してください。

③ 汚染に十分に注意し、包装から取り出します。

④ 接続する器具と本品をしっかり接続します。

◎使用前の準備事項に関連する注意

・径が合わず、緩い若しくはきつ過ぎる器具とは接続しないでください。

・接続抜けがないように確実に差し込んでください。また、使用中は接続部に負荷がかからないように注意してください。

[接続緩みや外れにより排液漏れが生じる可能性があるため。また、エアリークが生じ必要とする吸引圧が得られない可能性があるため。]

◎使用時の操作事項に関連する注意

・本品を吸引器より高いところへ固定したり持ち上げたりしないでください。[排液が逆流し、逆行感染を引き起こす可能性があるため。]

<使用方法に関連する使用上の注意>

・あらかじめ接続部に緩みがないことを確認してから使用してください。また、使用中は定期的に緩み、外れがないことを確認してください。

・本品が身体の下等に挟まれないように注意してください。[チューブの折れ、閉塞、破損等が生じる可能性があるため。]

・チューブが折れ曲げられたり、引っ張られた状態で使用し

ないでください。

### 【使用上の注意】

・<重要な基本的注意>

・包装が汚損、破損している場合や製品に破損等の異常が認められる場合は使用しないでください。

・本品は未滅菌製品である。

・包装を開封したらずちに使用し、使用後は感染防止に留意し安全な方法で処分してください。

・併用する医薬品及び医療機器の添付文書、取扱説明書を確認後、使用してください。

・使用中は本品の破損、接続部の緩み及び液漏れ等について、定期的に確認してください。

・接続部を汚染させないでください。

・本品はポリ塩化ビニルの可塑剤であるフタル酸ジ(2-エチルヘキシル)が溶出する恐れがあるので注意してください。

・チューブを鉗子等でつまんで傷をつけないように、また、注射針の先端、はさみ等の刃物、その他鋭利物等で傷をつけないように注意してください。[液漏れ、空気の混入、破断が生じる可能性があるため。]

・本品を落としたり、衝撃を与えると破損する恐れがありますので、取扱いに注意してください。

・万一、製品に破損・汚損等の異常が認められた場合には使用しないでください。

・操作は、全て無菌的に行ってください。

・本品は手技に精通した医師が使用してください。

・本品を医療用の目的以外には使用しないでください。

### 【保管方法及び有効期間等】

<保管方法>

・構成品によっては、割れやすいものがありますので、取扱いには十分ご注意ください。

・高温、多湿、直射日光、水濡れを避けて保管してください。

・蛍光灯、紫外線殺菌灯下やオゾンを発生する器械の周辺等に保管しないでください。

<有効期間>

・有効期間はラベルに記載

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

<製造販売業者>

株式会社 ホギメディカル

東京都港区赤坂2-4-6 赤坂グリーンクロス

お問合せ窓口：市販後管理課

TEL：03(6229)1300

0120(85)8120

FAX：03(6229)1350

URL：https://www.hogy.co.jp

<製造業者>

株式会社 ホギメディカル



\*XXXXXXXXXXXXXXXXXX\*