

医 04 整形用品
32374000 X線造影材入りガーゼ
一般医療機器

X線ガーゼ


再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止
- ＜適用対象（患者）＞
 - ・本品に対する感作やアレルギー反応を示す可能性のある患者には使用しないこと。【銅・銀・スズ・ニッケルを含むため。】

【形状・構造及び原理等】

- ・本品は綿糸を織り上げた IC タグ付 X 線造影系入りガーゼです。
- ＜構造＞

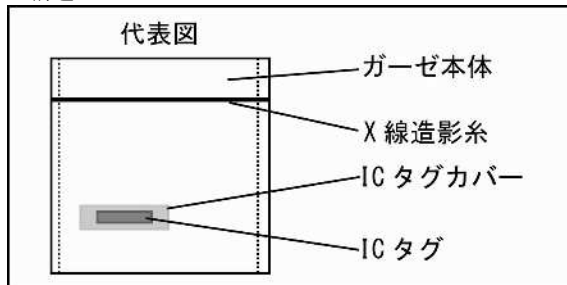

＜組成＞

- i) ガーゼ：綿 100%
- * ii) X 線造影系：X 線造影系：硫酸バリウム、ポリスチレン、色素（カーボンブラック）
- iii) IC タグ：銅、ポリイミド樹脂、セラミック、その他
- iv) IC タグカバー：ポリプロピレン、セルロース

＜原理＞

- ・本品は、綿布を当てることによる出血の抑制、擦過傷、汚染からの保護、吸収性能による液の吸収、及び水分保持性能による乾燥からの保護ができます。また、X 線造影材の X 線透過性により体内残留を防止することができます。

【使用目的又は効果】

＜使用目的＞

- ・本品は、出血の抑制、液の吸収、擦過傷、乾燥又は汚染からの器官の保護のため、外科切開口、他の皮膚創傷又は内部構造の保護に適用することを使用目的とします。

＜効果＞

- ・本品は、出血の抑制、液の吸収、擦過傷、乾燥又は汚染から器官を保護することができます。また、X 線造影材を入れることにより、体内残留を防止することができます。

【使用方法等】

- ・本品は、IC 読取装置（IC トレーサー）と併用します。
- ・本品は、ディスプレイ製品であるので、1 回限りの使用で使い捨て、再使用はしないでください。
- ・医師の判断にて適宜使用してください。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

- ・併用する読取装置（IC トレーサー）を用いて術前ガーゼ登録を行なう際に、表示枚数の読み取りができない場合は使用しないでください。
- ・使用中に IC タグカバーが破損して IC タグが露出されていることが確認された場合、又は IC タグカバーが剥がれていることが確認された場合、直ちに使用を中止してください。
- ・本品の上に硬質の物を載せないよう注意してください。【IC タグが破損して機能しない恐れがあるため。】
- ・鋭利な刃物を用いる場合は、IC タグ部分を傷つけないよう慎重に行なってください。【IC タグが破損し機能なくなる恐れがあるため。】
- ・ガーゼを把持する場合は、IC タグ部分を把持しないように慎重に行なってください。又、器具等を用いて本品を挟む場合は、IC タグ部分以外のガーゼを挟んで使用してください。【IC タグが破損し機能なくなる恐れがあるため。】
- ・鋭利な刃物を用いる場合は、X 線造影系を傷つけないよう慎重に行なってください。又、器具等を用いて本品を挟む場合は、X 線造影系部分以外のガーゼを挟んで使用してください。【X 線造影系が切れたり抜け落ちて、体内に残存する恐れがあるため。】

- ・本品を添付文書記載の使用目的以外の用途に使用しないでください。【IC タグが破損して機能しない、または IC タグカバーが破損して IC タグが露出する恐れがあるため。】
- ・電気メスなどを用いる場合は、IC タグ部分に直接作用させないでください。【IC タグが破損し機能なくなる恐れがあるため。】

- ・本品に過度な力を加えて使用しないでください。【過度な力を加えると、X 線造影系がちぎれる、または IC タグカバーが剥がれ、体内に残存する恐れがあるため。又、IC タグが破損し機能なくなる恐れがあるため。】

- ・体内に留置しないでください。
- ・包装材料に傷をつけたりしないように取り扱ってください。
- ・術後抜去し、生体内に埋没しないでください。
- ・使用前後で枚数を確認してください。
- ・再滅菌禁止

＜相互作用（他の医薬品・医療機器等との併用に関すること）＞

◎併用注意（併用に注意すること）

- ・ポビドンヨード液や過酸化水素水に長時間浸漬しないでください。【強度が低下するため。】
- ・グルコン酸クロルヘキシジン液、塩化ベンザルコニウム液、塩化ベンゼトニウム液等に長時間浸漬した場合、有効成分の吸着が起こりますので、濃度管理を行なってください。



XXXXXXXXXXXXXXXX

【保管方法及び有効期間等】

＜保管方法＞

・高温、多湿、直射日光、水濡れを避けて保管してください。

・蛍光灯、紫外線殺菌灯下やオゾンが発生する器械の周辺等に保管しないでください。

＜有効期間＞

・有効期間はラベルに記載

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

＜製造販売業者＞

株式会社 ホギメディカル

**東京都港区赤坂 2-4-6 赤坂グリーンクロス

**お問合せ窓口：市販後管理課

TEL：03(6229)1300

0120(85)8120

FAX：03(6229)1350

**URL：https://www.hogy.co.jp

＜製造業者＞

株式会社 ホギメディカル