

医 04 整形用品
35531000 単回使用汎用サージカルドレープ
一般医療機器

サージカルメイト

再使用禁止


【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止
- ・ヨウ素に過敏症のある患者には使用しないこと。[ヨウ素過敏症を発症する恐れがあるため。]

【形状・構造及び原理等】

- ・本品は、ポリエステル系フィルムを主材料としています。
- ・本品は、アクリル系粘着材（ヨウ素化合物含有）を使用しています。

＜構造＞

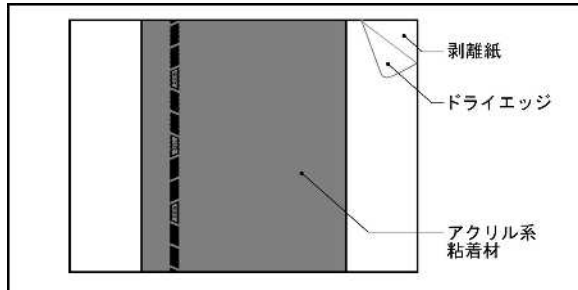

＜原理＞

・本品は、貫通孔がないフィルムであるため、血液、体液等の浸透を防ぐだけの高いバリア性を有します。また、フィルムを使用することにより、菌が移動することを防ぐため、創感染のリスクも減少させます。また、接着力の高い粘着材を使用しているため、長時間の手術においても創縁部からはがれません。

【使用目的又は効果】

＜使用目的＞

・本品は、手術時の術野である切開部位周辺へ貼付することをもって使用し、創部への皮膚常在菌の移行を防ぐことを目的としたディスポーザブル製品です。

＜効果＞

・本品は、手術室やカテーテル処置室の汚染（器具やテーブルの上）から外科切開部位や術野を隔離することができ、保護的なカバー又は障壁の効果を有します。また、貼付して使用することにより、優れた創部への皮膚常在菌の移行を防ぐ効果を有します。

【使用方法等】

・本品は、ディスポーザブル製品であるので、1回限りの使用で使い捨て、再使用はしないでください。

①貼り方

- i) 本品の貼付は、医師の管理下で無菌的に行ってください。
- ii) 消毒した貼付部分の皮膚を十分に乾燥させます。

iii) 本品を貼付予定部位の直上にて、一人が粘着材の塗布されていない部分（ドライエッジ）の両端を両手で保持し、また、もう一人が剥離紙の両端を両手で把持し、慎重に展開（剥離）を行います。

iv) 剥離紙上の『STOP』マークが視認できたら、展開操作を一時中断し、貼付予定部位に中央より貼付します。貼付の際は、フィルムを引っ張らない状態にて操作してください。中央部より徐々に貼付することで、気泡の混入、シワの形成が少なく貼付できます。

v) 貼付後、残りの剥離部分を慎重に剥離し、皮膚への貼付を行います。

②はがし方

i) 本品をはがす際には、フィルムを 180° の角度で折り返すようにゆっくりとはがします。はがす際は、粘着境界面を手で押さえ、皮膚に緊張をかけないよう配慮してください。粘着面より上方へ引っ張らないでください。

＜使用方法等に関連する使用上の注意＞

・本品は、消毒した皮膚を十分乾燥させてから使用してください。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

*・可燃性消毒薬をご使用の際は、消毒後アルコール等を拭き取り、または気化拡散させてから本品を使用してください。

[電気メス等をご使用の際、気化したアルコール蒸気の濃度次第で引火するため。]

・本品の粘着材は医療用途のものを使用していますが、個人差によって皮膚に対する刺激性が発生する場合があります。本品の使用によって患者の皮膚に異常が見られた場合、直ちに使用を中止し、適切な処置を施してください。

・高齢患者など皮膚が脆弱な患者に対して、粘着材を皮膚に貼付、剥離する際には十分に観察し、患者の皮膚に異常が見られた場合、直ちに使用を中止し、適切な処置を施してください。

・再滅菌禁止

＜その他注意＞

・本品は高熱を発する医療機器等、またはその他火気に接触すると、燃焼あるいは発火する危険性があります。

【保管方法及び有効期間等】

＜保管方法＞

・高温、多湿、直射日光、水濡れを避けて保管してください。
・蛍光灯、紫外線殺菌灯やオゾンが発生する機器周辺等に保管しないでください。

*＜有効期間＞

*・有効期間はラベルに記載

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】



XXXXXXXXXXXXXXXX

HOGY

<製造販売業者>

株式会社 ホギメディカル

**東京都港区赤坂 2-4-6 赤坂グリーンクロス

**お問い合わせ窓口：市販後管理課

TEL：03(6229)1300

0120(85)8120

FAX：03(6229)1350

**URL：<https://www.hogy.co.jp>

<製造業者>

株式会社 ホギメディカル