

医 04 整形用品
35531000 単回使用汎用サージカルドレープ
一般医療機器

メッキンドレープ

再使用禁止


*【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

<形状>

- ・代表図（下記図面はあくまでも代表的な図面であり、実際の製品とは異なる場合があります。）

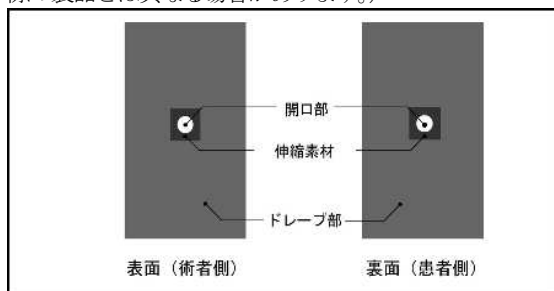

- ・本品は、ポリエチレン、ポリエステル等を使用しております。

- ・開口部にポリウレタン系の伸縮素材を使用しております。

<原理>

- ・本品は、ポリエチレン、ポリエステル等を主原料とした素材を積層し、貫通孔のない1枚のシートにしたものを使用しているため、血液、体液等の浸透を防ぐバリア性を有しています。

【使用目的又は効果】

<使用目的>

- ・本品は、手術時の術野の確保を目的とした覆布のディスポーザブル製品であり、手術、処置等に使用することを目的としています。

<効果>

- ・本品は、手術室やカテーテル処置室の汚染（器具やテーブルの上）から外科切開部位や術野を隔離することができ、保護的なカバー又は障壁の効果を有しています。

【使用方法等】

- ・ディスポーザブル製品であるので、1回限りの使用で再使用しないでください。

- ・本品は、医師の管理下にて、無菌的に展開を行い、ご使用ください。

<使用方法等に関連する使用上の注意>

- ・本品を患者の顔部に使用される場合には、呼吸の確保を充分に行ってご使用ください。[本品は通気性がないため、患者の口鼻が塞がれた場合に呼吸困難に陥る恐れがあるため。]

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

- ・可燃性消毒薬をご使用の際は、消毒後アルコール等を拭き取り、又は気化拡散させてから本品を使用してください。[電気メス等をご使用の際、気化したアルコール蒸気の濃度次第で引火します。]

- ・本品は伸縮素材が含まれております。本品を使用する際に駆血をされるときは、適切な手順で駆血を行い、また使用される患者の体型に合った径の製品をご使用ください。[清潔野の確保が不十分となったり、伸縮素材でうっ血を起こす可能性があるため。]

- ・再滅菌禁止

<その他注意>

- ・本品は高熱を発する医療機器等、またはその他火気に接触すると、燃焼あるいは発火する危険性があります。

【保管方法及び有効期間等】

<保管方法>

- ・高温、多湿、直射日光、水濡れを避けて保管してください。
- ・蛍光灯、紫外線殺菌灯下やオゾンが発生する器械の周辺等に保管しないでください。

*<有効期間>

- ・有効期間はラベルに記載

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

<製造販売業者>

株式会社 ホギメディカル

****東京都港区赤坂 2-4-6 赤坂グリーンクロス**

****お問合せ窓口：市販後管理課**

TEL：03(6229)1300

0120(85)8120

FAX：03(6229)1350

****URL：https://www.hogy.co.jp**

<製造業者>

株式会社 ホギメディカル



XXXXXXXXXXXXXXXX