

医 04 整形用品
34655000 医療用不織布
一般医療機器

セフタル

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

*・本品は不織布ガーゼを重ね周囲等を縫製し、ヒモ状、又は輪状の柄を付けたものです。

*＜組成＞

*不織布ガーゼ：レーヨン及びポリエステル又はリヨセル

*縫糸：ポリエステル

*柄：ウッドパルプ及びポリエステル

*＜原理＞

*・本品は、不織布からなり、手術時等の血液、体液の吸収、創部の保護等を行います。

【使用目的又は効果】

*＜使用目的＞

・人の皮膚、粘膜、組織、骨又は血液と接触し、創傷面の保護、血液、体液等の吸収又は薬剤の塗布等に使用できます。

*＜効果＞

*・本品は、滅菌済み製品であり、包装開封後そのまま直ちに使用できます。

【使用方法等】

*・本品は、ディスポーザブル製品であるので、1回限りの使用で使い捨て、再使用はしないでください。

*・医師の判断にて適宜使用してください。

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

*・包装材料に傷をつけたりしないように取り扱ってください。

・本品は体腔内に使用しないでください。

・再滅菌禁止

<相互作用（他の医薬品・医療機器等との併用に関する事）>

◎併用注意（併用に注意すること）

・過酸化水素水やポビドンヨード液に長時間浸漬しないでください。[強度が低下するため。]

*・グルコン酸クロルヘキシジン液、塩化ベンザルコニウム液、塩化ベンゼトニウム液等に長時間浸漬した場合、有効成分の吸着が起きますので、濃度管理を行なってください。

【保管方法及び有効期間等】

*＜保管方法＞

・高温、多湿、直射日光、水濡れを避けて保管してください。

い。

*・蛍光灯、紫外線殺菌灯下やオゾンが発生する器械の周辺等に保管しないでください。

**＜有効期間＞

***・有効期間はラベルに記載

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

<製造販売業者>

株式会社 ホギメディカル

〒107-8615 東京都港区赤坂2丁目7番7号

お問合せ窓口：市販後調査部

TEL：03(6229)1300

0120(85)8120

FAX：03(6229)1350

URL：http://www.hogy.co.jp

<製造業者>

株式会社 ホギメディカル



XXXXXXXXXXXXXXXX