

医 04 整形用品
32374000 X線造影材入りガーゼ
一般医療機器

セフタルX

再使用禁止


**【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止
- ＜適用対象（患者）＞
- ・本品に対する感作やアレルギー反応を示す可能性のある患者には使用しないこと。【銅・銀・スズ・ニッケルを含むため。】

【形状・構造及び原理等】

- ・本品はIC タグ付 X 線造影材入り不織布ガーゼです。
- ・本品には、紐が付いた形状のものも有します。

*＜構造＞

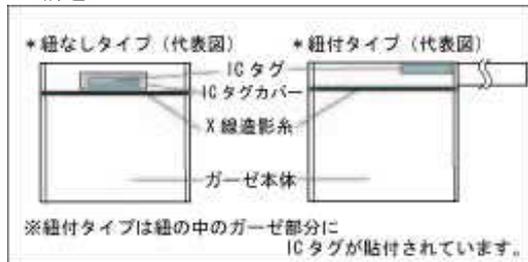

＜組成＞

- i) 不織布ガーゼ：セルロース 100%
- ii) X 線造影剤：ポリプロピレン、硫酸バリウム、ポリエステル
- iii) IC タグ：銅、ポリイミド樹脂、セラミック、その他
- iv) IC タグカバー：ポリプロピレン、セルロース

＜原理＞

・本品は、不織布からなり、手術時等の血液、体液の吸収、創部の保護等を行います。また、X 線造影材の X 線不透過性により体内残留を防止することができます。

【使用目的又は効果】

＜使用目的＞

・人の皮膚、粘膜、組織、骨又は血液と接触し、創傷面の保護、血液、体液等の吸収又は薬剤の塗布等に使用できます。

*＜効果＞

・本品は、滅菌済み製品であり、包装開封後そのまま直ぐに使用できます。また、X 線造影材を入れることにより、体内残留を防止することができます。

【使用方法等】

- ・本品は、IC 読取装置（IC トレーサー）と併用します。
- * 本品は、ディスポーザブル製品であるので、1 回限りの使用で使い捨て、再使用はしないでください。
- ・医師の判断にて適宜使用してください。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

・併用する読取装置（IC トレーサー）を用いて術前に不織布ガーゼ登録を行なう際、表示枚数の読み取りができない場合は使用しないでください。

・使用中に IC タグカバーが破損して IC タグが露出されていることが確認された場合、直ちに使用を中止してください。

・本品の上に硬質の物を載せないよう注意してください。【IC タグが破損して機能しない恐れがあるため。】

**・鋭利な刃物を用いる場合は、IC タグ部分を傷つけないよう慎重に行なってください。【IC タグが破損し機能しなくなる恐れがあるため。】

**・不織布ガーゼを把持する場合は、IC タグ部分を把持しないよう慎重に行なってください。又、器具等を用いて本品を挟む場合は、IC タグ部分以外の不織布ガーゼを挟んで使用してください。【IC タグが破損し機能しなくなる恐れがあるため。】

**・鋭利な刃物を用いる場合は、X 線造影剤部分を傷つけないよう慎重に行なってください。又、器具等を用いて本品を挟む場合は、X 線造影剤部分以外の不織布ガーゼを挟んで使用してください。【X 線造影剤が切れたり抜け落ちて、体内に残存する恐れがあるため。】

**・本品を添付文書記載の使用目的以外の用途に使用しないでください。【IC タグが破損して機能しない、または IC タグカバーが破損して IC タグが露出する恐れがあるため。】

**・電気メスなどを用いる場合は、IC タグ部分に直接作用させないでください。【IC タグが破損し機能しなくなる恐れがあるため。】

**・本品に過度な力を加えて使用しないでください。【過度な力を加えると、X 線造影剤がちぎれる、または IC タグカバーが剥がれ、体内に残存する恐れがあるため。又、IC タグが破損し機能しなくなる恐れがあるため。】

**・体内に留置しないでください。

・包装材料に傷をつけたりしないように取り扱ってください。

・術後抜去し、生体内に埋没しないでください。

・使用前後で枚数を確認してください。

・再滅菌禁止

＜相互作用(他の医薬品・医療機器等との併用に関する事)＞

>

◎併用注意（併用に注意すること）

・ポビドンヨード液や過酸化水素水に長時間浸漬しないでください。【強度が低下するため。】

・グルコン酸クロルヘキシジン液、塩化ベンザルコニウム液、塩化ベンゼトニウム液等に長時間浸漬した場合、有効成分の吸着が起きますので、濃度管理を行なってください。

【保管方法及び有効期間等】



XXXXXXXXXXXXXXXX

HOGY

*<保管方法>

・高温、多湿、直射日光、水濡れを避けて保管してください。

・蛍光灯、紫外線殺菌灯下やオゾンを発生する器械の周辺等に保管しないでください。

**<有効期間>

**・有効期間はラベルに記載

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

<製造販売業者>

株式会社 ホギメディカル

〒 107-8615 東京都港区赤坂2丁目7番7号

お問合せ窓口：市販後調査部

TEL：03(6229)1300

0120(85)8120

FAX：03(6229)1350

URL：<http://www.hogy.co.jp>

<製造業者>

株式会社 ホギメディカル