

医 04 整形用品
34655000 医療用不織布
一般医療機器

セフタル（未滅菌）

再使用禁止

【禁忌・禁止】

・再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

*・本品は不織布を主体とし、手術・処置部位の確保、血液・体液の吸収、組織・器官・切開部・創傷部の保護等の目的で、1回限りの使用とする医療用不織布ガーゼです。

*＜形状、構造＞

*本品には、下記の形状を有するものも有ります。

*・縫製された形状

*・スリット部を有する形状

*・穴が開いた部分を有する形状

＜組成＞

不織布ガーゼ：レーヨン及びポリエステル、又はリヨセル

縫糸：ポリエステル

＜原理＞

・本品は、不織布からなり、手術時等の血液、体液の吸収、創部の保護等を行います。

【使用目的又は効果】

・人の皮膚、粘膜、組織、骨又は血液と接触し、創傷面の保護、血液、体液等の吸収又は薬剤の塗布等に使用できます。

【使用方法等】

*・本品はディスポーザブル製品であり、1回限りの使用で再使用しないでください。

・本品は未滅菌品であるため、用事滅菌を行ってから使用してください。滅菌にはエチレンオキシドガス滅菌を推奨します。

＜使用方法等に関連する使用上の注意＞

・滅菌条件については、滅菌装置の使用等方法をご考慮のうえ、適切な条件を設定してください。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

・包装材料に傷をつけたりしないように取り扱ってください。

・本品は体腔内に使用しないでください。

＜相互作用（他の医薬品・医療機器等との併用に関する事）＞

◎併用注意（併用に注意すること）

・過酸化水素水やポビドンヨード液に長時間浸漬しないでください。[強度が低下するため。]

・グルコン酸クロルヘキシジン液、塩化ベンザルコニウム液、塩化ベンゼトニウム液等に長時間浸漬した場合、有効成分の吸着が起りますので、濃度管理を行なってください。

い。

【保管方法及び有効期間等】

＜保管方法＞

・高温、多湿、直射日光、水濡れを避けて保管してください。

・蛍光灯、紫外線殺菌灯下やオゾンが発生する器械の周辺等に保管しないでください。

＜有効期間＞

・有効期間はラベルに記載

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

＜製造販売業者＞

株式会社 ホギメディカル

**東京都港区赤坂 2-4-6 赤坂グリーンクロス

**お問合せ窓口：市販後管理課

TEL：03(6229)1300

0120(85)8120

FAX：03(6229)1350

**URL：<https://www.hogy.co.jp>

＜製造業者＞

株式会社 ホギメディカル



XXXXXXXXXXXXXXXX