

医 04 整形用品
32374000 X線造影材入りガーゼ
一般医療機器

セフタルX（未滅菌）

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

- ・本品はX線造影系入り不織布ガーゼです。
- ・体内からの取り出し忘れを防止する目的でX線造影系が入っています。

<組成>

不織布ガーゼ：レーヨン及びポリエステル又はリヨセル
造影系：ナイロン（硫酸バリウム）又はポリプロピレン（硫酸バリウム）

<原理>

- ・本品は、吸液性を持つ不織布であるため、手術時の血液、体液の吸収、創部の保護等を行います。また、X線造影材のX線不透過性により体内残留を防止することが出来ます。

【使用目的又は効果】

- ・人の皮膚、粘膜、組織、骨又は血液と接触し、創傷面の保護、血液、体液等の吸収又は薬剤の塗布等に使用できます。また、X線造影材を入れているため、体内残留を防止することができます。

【使用方法等】

- ・本品は、ディスポーザブル製品であるので、1回限りの使用で使い捨て、再使用はしないでください。
- ・医師の判断にて適宜使用してください。
- ・本品は未滅菌品であるため、用事滅菌を行ってから使用してください。滅菌にはエチレンオキシドガス滅菌を推奨します。

<使用方法等に関連する使用上の注意>

- ・滅菌条件については、滅菌装置の使用等方法をご考慮のうえ、適切な条件を設定してください。

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

- ・包装材料に傷をつけないように取り扱いってください。

- ・使用前後で枚数を確認してください。

- ・術後抜去し、生体内に埋没しないでください。

<相互作用(他の医薬品・医療機器等との併用に関する事)>

◎併用注意（併用に注意すること）

- ・過酸化水素水やポビドンヨード液に長時間浸漬しないでください。[強度が低下するため。]

- ・グルコン酸クロルヘキシジン液、塩化ベンザルコニウム液、塩化ベンゼトニウム液等に長時間浸漬した場合、有効成分の吸着が起きますので、濃度管理を行なってください。

い。

【保管方法及び有効期間等】

<保管方法>

- ・高温、多湿、直射日光、水濡れを避けて保管してください。
- ・蛍光灯、紫外線殺菌灯下やオゾンが発生する器械の周辺等に保管しないでください。

*<有効期間>

- *・有効期間はラベルに記載

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

<製造販売業者>

株式会社 ホギメディカル

****東京都港区赤坂 2-4-6 赤坂グリーンクロス**

****お問合せ窓口：市販後管理課**

TEL：03(6229)1300

0120(85)8120

FAX：03(6229)1350

****URL：https://www.hogy.co.jp**

<製造業者>

株式会社 ホギメディカル



XXXXXXXXXXXXXXXX