

医 04 整形用品
34655000 医療用不織布
一般医療機器

スパーテルカバーN


再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止
- ・未滅菌で使用しないこと。[本品は未滅菌製品であり、滅菌を施さない場合は感染等の可能性があるため。]

【形状・構造及び原理等】

＜構造＞

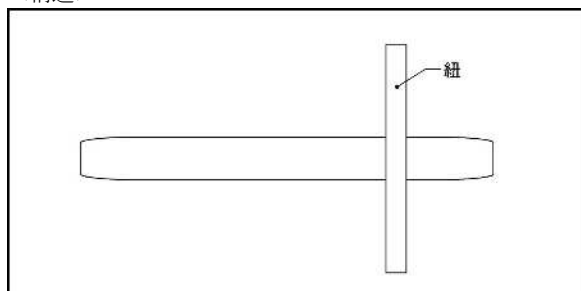

＜原理＞

- ・不織布を縫製して筒状にすることで、器具などを入れられます。
- ・さらに抜けないように紐を取り付けた製品もあります。
- ・本品は未滅菌品です。

＜組成＞

- ・ウッドパルプ、ポリエステル

【使用目的又は効果】

＜使用目的＞

- ・開腹手術などで腸などの臓器を愛護的に圧排するときの器具用のカバーとして使用します。

＜効果＞

- ・本品を使用することで器具の直接接触を防ぎ、臓器の損傷を防ぐことができます。

【使用方法等】

- ・本品は、ディスポーザブル製品であるので、1回限りの使用で使い捨て、再使用はしないでください。

＜滅菌＞

- ・本品は未滅菌製品であるため、用時滅菌を行ってから使用してください。
- ・滅菌にはエチレンオキサイドガス滅菌を推奨します。
- ・滅菌後は、医師の管理下で無菌的にご使用ください。

＜使用方法＞

- ・本品は器具などに装着して使用してください。

＜使用方法等に関連する使用上の注意＞

- ・滅菌条件については、滅菌装置の使用等方法を考慮の上、適切な条件を設定してください。
- ・滅菌した後、全ての操作は無菌的に行ってください。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

- ・包装材料に傷をつけたり、ピンホールを生じさせないように取扱ってください。
- ・本品を装着する器具などは滅菌済のものを使用してください。
- ・再滅菌禁止

【保管方法及び有効期間等】

＜保管方法＞

- ・高温、多湿、直射日光、水濡れを避けて保管してください。
- ・蛍光灯、紫外線殺菌灯下やオゾンが発生する器械の周辺等に保管しないでください。

*＜有効期間＞

- *・有効期間はラベルに記載

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

＜製造販売業者＞

株式会社 ホギメディカル

****東京都港区赤坂 2-4-6 赤坂グリーンクロス**

****お問合せ窓口：市販後管理課**

TEL：03(6229)1300

0120(85)8120

FAX：03(6229)1350

****URL：https://www.hogy.co.jp**

＜製造業者＞

株式会社 ホギメディカル



XXXXXXXXXXXXXXXX