

医 04 整形用品
34655000 医療用不織布
一般医療機器

スパーテルカバー


再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

*<構造>

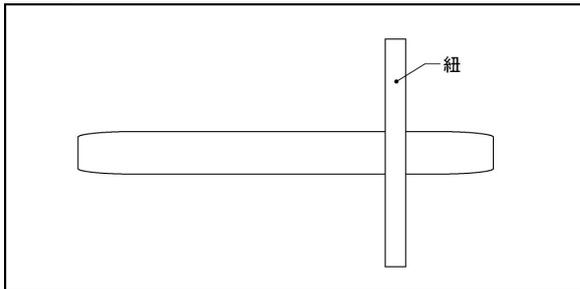

<原理>

- ・不織布を縫製して筒状にすることで、器具などを入れます。
- ・さらに抜けないように紐を取り付けた製品もあります。

<組成>

- ・ウッドパルプ、ポリエステル

【使用目的又は効果】

<使用目的>

- ・開腹手術などで腸などの臓器を愛護的に圧排するときの器具用のカバーとして使用します。

*<効果>

- ・本品を使用することで器具の直接接触を防ぎ、臓器の損傷を防ぐことができます。

【使用方法等】

- *・本品は、ディスプレイ製品であるので、1回限りの使用で使い捨て、再使用はしないでください。

- ・本品は医師の管理下で無菌的にご使用ください。

<使用方法>

- ・本品は器具などに装着して使用してください。

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

- ・包装材料に傷をつけたり、ピンホールを生じさせないように取扱ってください。
- ・本品を装着する器具などは滅菌済のものを使用してください。
- ・包装の開封後の操作は全て、無菌的に行ってください。
- ・再滅菌禁止

【保管方法及び有効期間等】

*<保管方法>

- ・高温、多湿、直射日光、水濡れを避けて保管してください。
- ・蛍光灯、紫外線殺菌灯下やオゾンが発生する器械の周辺等に保管しないでください。

**<有効期間>

- **・有効期間はラベルに記載

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

<製造販売業者>

株式会社 ホギメディカル

〒 107-8615 東京都港区赤坂 2 丁目 7 番 7 号

お問合せ窓口：市販後調査部

TEL：03(6229)1300

0120(85)8120

FAX：03(6229)1350

URL：http://www.hogy.co.jp

<製造業者>

株式会社 ホギメディカル



XXXXXXXXXXXXXXXX