

器 36 医療用ピンセット
35079002 単回使用ピンセット
管理医療機器

鑷子

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止

お問合せ窓口：市販後調査部

TEL：03(6229)1300


0120(85)8120

FAX：03(6229)1350

URL：http://www.hogy.co.jp

【形状・構造及び原理等】

*＜構造＞

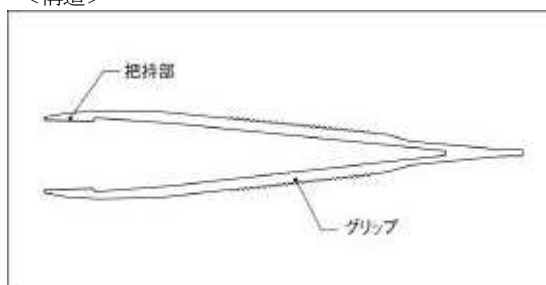

<製造業者>

株式会社 ホギメディカル

- ・本品は、13 クロム系ステンレスを使用しております。

【使用目的又は効果】

- ・本品は治療の際に皮膚や組織、異物等をつまみ、又は把持するために用いる器具です。

【使用方法等】

- *・本品は、ディスポーザブル製品であるので、1 回限りの使用で使い捨て、再使用はしないでください。
- ・本品はグリップ部を握り先端の把持部で皮膚や組織、異物等をつまみ、又は把持します。

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

****・電気メスを直接接触させないでください。[火傷や感電の危険があるため。]**

- ・ご使用前に器具が正常に動作することを確認してください。
- ・本品は、使用中に酸や生理食塩液等金属を錆びさせる物質との接触は最小限にとどめてください。
- ・再滅菌禁止

【保管方法及び有効期間等】

*＜保管方法＞

- ・高温、多湿、直射日光、水濡れを避けて保管してください。

****＜有効期間＞**

****・有効期間はラベルに記載**

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

<製造販売業者>

株式会社 ホギメディカル

〒 107-8615 東京都港区赤坂2丁目7番7号



XXXXXXXXXXXXXXXX