

器 36 医療用ピンセット
35079002 単回使用ピンセット
管理医療機器

プラセッシ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止


うに保管してください。

*＜有効期間＞

*・有効期間はラベルに記載

【形状・構造及び原理等】

＜構造＞

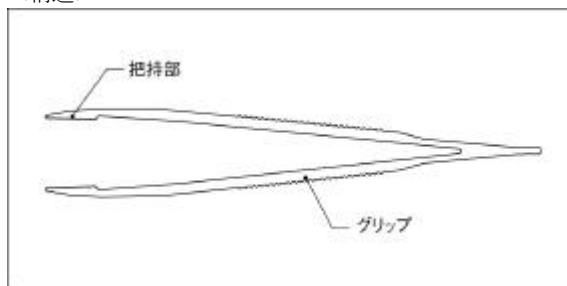

・本品は、電子線滅菌又はエチレンオキサイドガス滅菌を施した、ディスポーザブルなプラスチック製の鑷子です。

【使用目的又は効果】

- ・医療用の単回使用ピンセットとして用います。
- ・本品は消毒及びガーゼ交換時に綿球、ガーゼ等を把持するために使用する鑷子です。

【使用方法等】

- ・本品は、ディスポーザブル製品であるので、1回限りの使用で使い捨て、再使用はしないでください。
- ・医師の判断にて適宜使用してください。
- ・本品はグリップを握ることで先端が開閉し、先端把持部で綿球やガーゼ等の衛生材料を把持することができます。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

- ・ご使用前に器具が正常に動作することを確認してください。
- ・臓器、病変組織、異物等の把持、圧迫等には使用しないでください。
- ・再滅菌禁止

【保管方法及び有効期間等】

＜保管方法＞

- ・高温、高湿、直射日光及び水濡れを避け、室温で保管してください。
- ・清潔で乾燥した場所に荷重のかからないような状態で保管してください。
- ・化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないでください。
- ・包装材料を傷つけたり、ピンホールを生じたりしないよう

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

＜製造販売業者＞

株式会社 ホギメディカル

**東京都港区赤坂 2-4-6 赤坂グリーンクロス

**お問合せ窓口：市販後管理課

TEL：03(6229)1300

0120(85)8120

FAX：03(6229)1350

**URL：https://www.hogy.co.jp

＜製造業者＞

株式会社 ホギメディカル



XXXXXXXXXXXXXXXX