

医療用品 04 整形用品  
一般医療機器 単回使用汎用サージカルドレープ 35531000  
販売名:OcuDrape SMS(オキュドレープ)

再使用禁止

【禁忌・禁止】

・再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

形状



【使用目的・効能・効果】

手術室やカテーテル処置室の汚染(器具やテーブルの上)から外科切開部位や術野を隔離するために、保護的なカバー又は障壁として用いる不織布製の用具をいう。本品は患者を手術中の熱、炎又は他の形態のエネルギーから保護するためにも使用する。本品は単回使用である。

【操作方法又は使用方法】

1.使用準備

使用前に必ず滅菌状態に不備がないことを確認する。

2.使用中の操作

- (1)包装から本品を取り出す。
- (2)固定用テープをはがす。
- (3)使用箇所に応じて適度な大きさにカットする場合がある。
- (4)術野周辺に適切に貼る。

3.使用后

本品は単回使用であるので再使用はせず、感染防止を考慮して安全な方法で処分する。

【使用上の注意】

- ①本品は医療有資格者以外が使用しないこと。
- ② 本品は記載の用途以外には使用しないこと。
- ③ 使用前に必ず滅菌された製品であることを確認すること。
- ④ 包装が破損、汚損している場合、及び製品に破損、汚損などの異常が認められる場合には使用しないこと。
- ⑤ 使用後は感染防止に配慮して安全な方法で処分すること。

【貯蔵方法】

貯蔵・保管方法

- ① 埃等が付かない乾燥した場所で衛生的に管理すること。
- ② 水濡れに注意し、高温多湿・直射日光を避け、保存すること。

有効期間・使用の期限

- ① 有効保管期間の管理をすること。
- ② 包装のラベルに滅菌有効期限を記載している。

【滅菌方法】

滅菌方法:エチレンオキシドガス滅菌

【包装】

50 枚/箱

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者:株式会社 ホワイトメディカル  
住 所:東京都荒川区東日暮里 5-48-2

TEL:(03)3802-0655

製造業者:有限会社滅菌センターミヤチ