

改訂年月: 2025年7月(第4版)**

改訂年月: 2017年10月(第3版 新記載要領に基づく改訂)*

機械器具 42 医療用剥離子
起子 11504000 一般医療機器
ホームマン鈎

【禁忌・禁止】

- ・使用目的(手術・処置等の医療行為)以外に使用しないこと。
- ・過剰な力を加えないこと。
- ・本品を曲げる・切削する・打刻する等の二次的加工(改造)はしないこと[折損等の原因となるため。]

【形状・構造及び原理等】

形状・構造:



材質: ステンレス鋼及びPA6(6ナイロン)

原理: てこ状の形状をしており、鈎部を目的部へあてがいハンドル部を操作することで目的部を持ち上げる。

【使用目的又は効果】

組織又は他の解剖学的構造、手術材料又は器具の持ち上げ、配置又は梃子による押し上げに用いる手術器具をいう。近位にハンドルがあり、その先に鈍い刃、又は切刃のない鈎をもつ。形状及びサイズは解剖学的用途及び機能によって異なる。

【使用方法等】

・使用前

本製品使用前に、傷、割れ、有害なまくれ、さび、ひび割れ、接合不良等の不具合がないか、外観検査を実施すること。

本品は未滅菌品であるので、使用前に必ず洗浄及び滅菌すること。

本品の滅菌は医療機関内において以下の条件にて行うこと。

滅菌方法	滅菌条件
高圧蒸気滅菌	温度115℃ 時間30分
ガス滅菌	無菌性保証水準 10^{-6}

・使用方法

鈎部を目的部位にあて、ハンドル部を押すまたは引いて骨または体内固定用プレートを挙上し適切な位置に設置する。

*** 【使用上の注意】**

1. 重要な基本的注意

- ・本製品は使用に際し、予め手術手技及びその手順について十分に熟知した後、使用すること。
- ・使用目的(手術・処置等の医療行為)以外の目的で使用しないこと。また、折損、曲がり等の原因になり得るので使用時には必要以上の力(応力)を加えないこと。
- ・器械を重ねて置く等、負荷をかけないこと。

2. 相互作用

- ・併用禁忌(弊社が指定する製品以外との併用はしないこと)
- ・弊社が指定する手術手技以外には使用しないこと。

3. 不具合・有害事象

- 1) 本製品の適切な洗浄や滅菌を怠ると、感染する可能性がある。
- 2) 本品の破損片が遺残するとアレルギー反応、異物反応による炎症を生じることがある。この場合、破損片除去のための再手術が必要となる。
- 3) 不適切な部位での使用は血管、神経損傷または組織壊死を生じることがある。
- 4) 破損した本製品を使用することによる、手術従事者の皮膚の裂

傷や損傷及びグローブの破れを生じることがある。

- 5) 不具合・有害事象が発現した場合は、症状に応じて適切な処置を行うこと。

4. 高齢者への使用

高齢者は、骨が骨粗鬆化している場合があり、術中に過度の力を加えると骨折することがあるので、慎重に使用すること。

*** 【保管方法及び有効期間等】**

1. 貯蔵、保管方法

- 1) 直射日光・高温多湿を避け、塵やほこりのない清潔な場所で常温保管すること。また、水濡れや直射日光は避けるよう細心の注意を払うこと。
- 2) 本製品は、貯蔵、保管の際、変形や損傷の原因となりうる硬いものへの接触や、衝撃を避けるよう注意を払うこと。

2. 耐用期間

器械は使用頻度、保管状況にもよるが特定の時点で摩耗等により交換が必要になるので注意すること。傷、割れ、有害なまくれ、錆、ひび割れ、接合不良等は、耐用限界を示す劣化の症状である。

【保守・点検に係る事項】に基づき点検した結果、不良箇所が認められたとき及び不良が疑われるときは、新品と交換すること。

*** 【保守・点検に係る事項】**

使用者による保守点検事項:

点検項目	点検頻度(時期)
1) 本製品使用(滅菌)前に、傷、割れ、有害なまくれ、錆、ひび割れ、接合不良等の不具合がないか、外観検査を実施すること。	毎回、本製品使用(滅菌)前に実施する
2) 器械は使用状況、使用頻度、保管状況による摩耗や疲労を受けるため、明らかな劣化が見られる場合は、器具を廃棄し、新品と交換すること。	
3) 本品使用後は、できるだけ早く以下の手順に従って、洗浄、すすぎ等の汚染除去を行なうこと。 I) 汚染除去に用いる洗剤は、医療用中性洗剤等、洗浄方法に適したものを選択し、適正な濃度で使用すること。 II) 洗浄装置(超音波洗浄装置等)を使用するときは、洗浄時間、手順等は使用する装置の取り扱い説明書を遵守し、器具の隙間部に異物等がないことが確認できるまで洗浄すること。また、鋭利部同士が接触して損傷することがないように注意すること。 III) 洗浄後は直ちに乾燥すること。	毎回使用後に実施する

<p>4) 錆を防ぐために以下のことを守ること。</p> <p>I) 使用後は直ちに清水で洗浄を行うこと</p> <p>II) 強アルカリ／強酸性洗剤・消毒剤は器具を腐食させる恐れがあるので、使用を避けること。必ず医療用の中性洗剤を使用すること。洗浄には柔らかいブラシ、スポンジ等を使用し、金属たわし、クレンザー（磨き粉）は器具の表面が損傷するので汚染除去及び洗浄時の使用はしないこと。</p> <p>III) 洗浄後は直ちに乾燥させ、乾いた布で再度拭き取ること。</p> <p>5) 使用後は、以下の項目に関して点検を行うこと。</p> <p>I) 本製品に汚れ、変形、キズ、ヒビ割れ、破損、先端部の磨耗、機能低下等がないか。動作、外観に異常がないか確認する。</p> <p>II) 金属部と樹脂部の接合部に汚れがないか確認する。</p> <p>III) 穴部分に汚れがないか確認する。</p> <p>6) 点検終了後、操作方法又は使用方法欄に示す滅菌方法及び滅菌条件で滅菌を行い保管すること</p>	
---	--

****【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者：株式会社ホリックス

電話番号 055-925-4601

製造業者：株式会社ホリックス