


機械器具 01 手術台及び治療台 手術台アクセサリ 70469000 一般医療機器 ヒップポジショナー

【禁忌・禁止】

- ・使用目的（手術・処置等の医療行為）以外に使用しないこと。
- ・過剰な力を加えないこと。
- ・本品を曲げる・切削する・打刻する等の二次的加工（改造）はしないこと〔折損等の原因となるため。〕

【形状・構造及び原理等】

形状・構造：

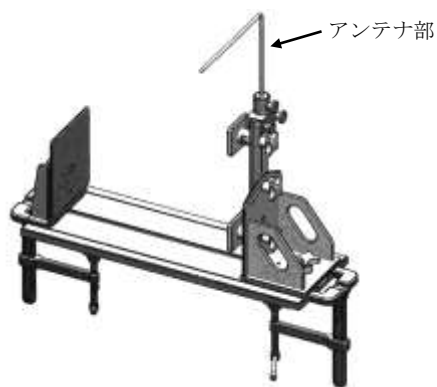

材質：アルミニウム合金、ステンレス鋼

原理：底板部に設けた 1 本の溝上で、2 つの衝立がそれぞれ任意の場所にネジ固定できる。

【使用目的又は効果】

本品は、人工股関節置換術等の手術時に患者の腰部を固定する手術台の補助器具である。

【使用方法等】

1. 使用前

- ・本製品使用前に、きず、割れ、有害なまくれ、さび、ひび割れ、接合不良等の不具合がないか、外観検査を実施すること。
- ・本品は未滅菌品である。本品のアンテナ部は使用前に洗浄及び滅菌すること。
- ・本品の滅菌は医療機関内において以下の条件又は、 10^{-6} の無菌性保証水準が得られる条件で滅菌を行うこと。

	温度	時間
高圧蒸気滅菌	121～124℃	15分

2. 使用方法

- ・メインベースにスライドベース A 及びスライドベース B を組み付け、手術台に L クランプで固定する。
- ・スライドベース A 及びスライドベース B の間に患者の腰部を挟み、適切な位置でスライドベース A 及びスライドベース B のネジノブを絞めて固定する。
- ・滅菌処理したアンテナ部をスライドベース A に取り付ける。アンテナ部は、人工股関節設置時の位置決めの目安として利用する。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- ・本製品は使用に際し、予め手術手技及びその手順について十分に熟知した後、使用すること。
- ・使用目的（手術・処置等の医療行為）以外の目的で使用しないこと。また、折損、曲がり等の原因になり得るので使用時には必要以上の力（応力）を加えないこと。
- ・器械を重ねて置く等、負荷をかけないこと。

2. 相互作用

- ・併用禁忌（弊社が指定する製品以外との併用はしないこと）
- ・弊社が指定する手術手技以外には使用しないこと。

3. 不具合・有害事象

- ・不具合・有害事象が発現した場合は、症状に応じて適切な処置を行うこと。

【保管方法及び有効期間等】＊

1. 保管方法

- ・直射日光及び高温多湿を避け保管すること。

2. 耐用期間：

- ・器械は使用頻度、保管状況にもよるが特定の時点で摩耗等により交換が必要になるので注意すること。きず、割れ、有害なまくれ、さび、ひび割れ、接合不良等は、耐用限界を示す劣化の症状である。

【保守・点検に係る事項】＊

使用者による保守点検事項：

保守点検項目	保守点検頻度（時期）
きず、割れ、有害なまくれ、さび、ひび割れ、接合不良等に関する外観検査	毎回、本製品使用（滅菌）前に実施する
酵素洗浄液等を用いた洗浄及びすすぎによる汚染除去および血液等異物が付着していないことの目視確認 （可動部、組合せ部、中空部等を有する器具は、開く、分解するなどしてブラシで入念に洗浄する）	毎回使用後、速やかに実施する

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社ホリックス

電話番号 055-925-4601

製造業者：株式会社ホリックス