

機械器具 01 手術台及び治療台
手術台アクセサリ 70469000 一般医療機器
手術台用力セットトレイ

【警告】

- ・本品は使用用途や機能に応じて適切に使用された場合でも、繰り返しの使用、洗浄、滅菌、経年劣化等に起因する疲労や腐食により材質が劣化し、破損する場合があります。

【禁忌・禁止】

- ・使用目的（手術・処置等の医療行為）以外に使用しないこと。[折損等の原因となるため。]
- ・過剰な力を加えないこと。[折損等の原因となるため。]
- ・本品を曲げる・切削する・打刻する等の二次的加工（改造）はしないこと[折損等の原因となるため。]

【形状・構造及び原理等】

形状・構造：



材質：ステンレス鋼

原理：手術台に差し込み、引出トレイとなる。

【使用目的又は効果】

本品は、引出型の手術台のアクセサリであり、手術や診断に使用する備品を収納する。

【使用方法等】

1. 使用前

本製品使用前に、傷、割れ、有害なまくれ、さび、ひび割れ、接合不良等の不具合がないか、外観検査を実施すること。

本品は未滅菌品であるので、使用前に洗浄及び滅菌すること。

本品の滅菌は医療機関内において以下の条件又は、 10^{-6} の無菌性保証水準が得られる条件で滅菌を行うこと。

	温度	時間
高圧蒸気滅菌	121～124℃	15分

2. 使用方法

- ・本品を手術台に差し込み、引出トレイとして備品を収納する。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- ・本製品は使用に際し、予め手術手技及びその手順について十分に熟知した後、使用すること。
- ・使用目的（手術・処置等の医療行為）以外の目的で使用しないこと。
また、折損、曲がり等の原因になり得るので使用時には必要以上の力（応力）を加えないこと。
- ・器械を重ねて置く等、負荷をかけないこと。

2. 相互作用

- ・併用禁忌（弊社が指定する製品以外との併用はしないこと）
- ・弊社が指定する手術手技以外には使用しないこと。

3. 不具合・有害事象

- ・不具合・有害事象が発現した場合は、症状に応じて適切な処置を行うこと。

【保管方法及び有効期間等】

耐用期間：

- ・器械は使用頻度、保管状況にもよるが特定の時点で摩耗等により交換が必要になるので注意すること。さび、割れ、有害なまくれ、さび、ひび割れ等は、耐用限界を示す劣化の症状である。

【保守・点検に係る事項】

使用者による保守点検事項：

点検項目	点検頻度（時期）
さび、割れ、有害なまくれ、さび、ひび割れ等に関する外観検査	毎回、本製品使用（滅菌）前に実施する
使用後は、できるだけ早く洗浄、すすぎ等の汚染除去を行い、血液等異物が付着していないことを目視で確認する	毎回使用後に実施する

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社ホリックス

電話番号 055-925-4601

製造業者：株式会社ホリックス