

機械器具 01 手術台及び治療台
手術台アクセサリ 70469000 一般医療機器
手台 K

【禁忌・禁止】

- ・使用目的（手術・処置等の医療行為）以外に使用しないこと。〔破損等の原因となるため。〕
- ・過剰な力を加えないこと。〔破損等の原因となるため。〕
- ・本品を曲げる・切削する・打刻する等の二次的加工（改造）はしないこと〔破損等の原因となるため。〕

【形状・構造及び原理等】

形状・構造：



材質：

受台：アクリル樹脂

支柱・接続部・蝶ボルト：ステンレス鋼

原理：アクリル板の受台とステンレスの支柱で構成されており、受台が患者の腕を支持し任意の体位を確保する。

【使用目的又は効果】

手術台に付属するアクセサリであり、患者の腕を支持するための器具。

【使用方法等】

- ・使用前
本製品使用前に、傷、割れ、有害なまくれ、さび、ひび割れ、接合不良等の不具合がないか、外観検査を実施すること。
- ・使用方法
受台と支柱の接続部を蝶ボルトで締めて固定し、受台を手術台のテーブル板とマットの間に差し込む。受台で患者の腕を支持し、任意の体位を確保する。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意
 - ・本製品は使用に際し、予め手術手技及びその手順について十分に熟知した後、使用すること。
 - ・使用目的（手術・処置等の医療行為）以外の目的で使用しないこと。また、破損、曲がり等の原因になり得るので使用時には必要以上の力（応力）を加えないこと。
 - ・患者の任意の体位を確保するために支持するときは、常に患者の状態を確認すること。長時間の体位は神経麻痺や褥瘡の原因となる。
 - ・器械を重ねて置く等、負荷をかけないこと。

2. 相互作用（他の医薬品・医療機器等との併用に関すること）

併用禁忌：

- ・弊社が指定する製品以外との併用はしないこと
- ・弊社が指定する手術手技以外には使用しないこと。

3. 不具合・有害事象

不具合・有害事象が発現した場合は、症状に応じて適切な処置を行うこと。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

- ・直射日光及び高温多湿を避け保管すること。

2. 耐用期間：

- ・器械は使用頻度、保管状況にもよるが特定の時点で摩耗等により交換が必要になるので注意すること。さび、割れ、有害なまくれ、さび、ひび割れ、接合不良等は、耐用限界を示す劣化の症状である。

【保守・点検に係る事項】

使用者による保守点検事項：

保守点検項目	保守点検頻度（時期）
さび、割れ、変形等に関する外観検査	毎回、本製品使用前に実施する
使用後は、できるだけ早く汚染除去を行い、汚れや異物が付着していないことを目視で確認する	毎回使用後に実施する

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社ホリックス

〒410-0001 静岡県沼津市足高294-46

電話番号 055-925-4601

製造業者：株式会社ホリックス