

機械器具 6 呼吸補助器

管理医療機器 酸素補給用鼻カニューレ (JMDN コード : 35201000)

酸素カニューラ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- 本製品を使用している近くでは火気厳禁とすること。
- 天然ゴムに対する過敏症のある患者には使用しないこと。


【形状・構造及び原理等】

商品規格 : HP3000 (大人用)、HP3100 (小児用)

本製品はポリ塩化ビニルを使用しています。

可塑剤:フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)

本製品は未滅菌品です。

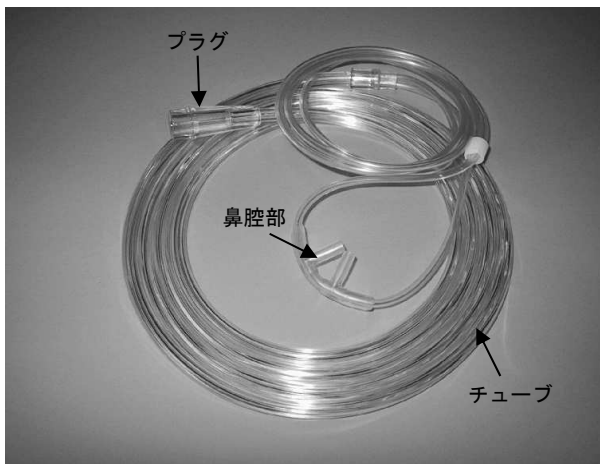

代表例(大人用)

【使用目的、効能又は効果】

患者の鼻孔に当てて酸素を供給する二股状のカニューレである。

【操作方法又は使用方法等】

酸素供給源にプラグを接続し、カニューラの先端の鼻腔部を鼻孔に挿入して下さい。

【使用上の注意】

- 本製品は一回限りの使用で、1 人の患者に対してのみ使用し、再使用しないで下さい。
- 包装の開封後はすぐに使用して下さい。
- 万一包装が破損、汚損している場合や製品に破損等の異常がみられる場合使用しないで下さい。
- 本製品を使用している近くでは火気を近づけないで下さい。
- 本製品を折り曲げたり、ねじったりしないで下さい。破損や閉塞の原因になります。破損や閉塞、漏れが生じた場合は新しいマスクと交換して下さい。
- 本製品は未滅菌の製品です。滅菌して使用される場合には、高圧蒸気滅菌や乾熱滅菌等の材質に影響を及ぼすおそれのある滅菌消毒方法は行わないで下さい。
- 使用後は医療用廃棄物として適切な処理・廃棄をして下さい。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

- 水濡れに注意し、高温多湿・直射日光をあたる場所を避けて常温で保管して下さい。
- 品質劣化を避けるため、製造後 3 年以内に使用して下さい。(製品に記載されているロット番号を製造日とする。)

【包装】

20 個入 / 1 箱

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者 : 株式会社ホスピタルサービス

京都市南区上鳥羽北塔ノ本町 10 番地

TEL 075-671-2361

製造業者 : シナー社 (台湾) Hsiner Co., Ltd.