

チューブ鉗子 HP1010 155mm

2018 年 1 月作成(第 1 版)

2024 年 3 月作成(第 2 版)

医療機器届出番号 26B1X10011000003

器械器具 39 医療用鉗子

一般医療機器 鉗子 (JMDN コード 10861001)


鉗子

【禁忌・禁止】

本製品を曲げ、切削、打刻(刻印)等の二次的
加工(改造)することは、折損等の原因となる
ので絶対に行なわないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状 代表的イラスト

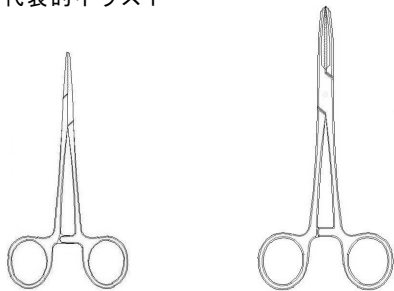

2. 原材料：ステンレス鋼

3. 原理：ハンドル部の開閉操作に連動し、先端にある 2 本の把持部が開閉される。

【使用目的又は効果】

臓器、組織又は血管を非外傷性に把持、結合、圧迫又は支持する
ために用いる手術器具をいう。

【使用方法等】

- (1) 使用前に、必ず洗浄・滅菌する。
- (2) ハンドル部に親指と中指等を通し、少し内側に押すようにして
ストッパーを外す。臓器等を把持するときには、ハンドル
部を握って適当な位置でストッパーを掛けて留める。

【使用上の注意】

- (1) 新品の手術器械には防錆油が塗布されており、防錆油を
洗浄除去する前に滅菌すると器械表面の変色や斑模様
付着の原因になるので、必ず滅菌前に防錆油を洗浄除去
すること。
- (2) 使用前に必ず洗浄・滅菌(保守・点検に係る事項参照)
をすること。
- (3) 使用目的(手術・処置等の医療行為)以外の目的で使用
しないこと。また、折損、曲がり等の原因になり得るの
で使用時に必要以上の力(応力)を加えないこと。
- (4) 使用後は、付着している血液、体液、組織及び薬品等が
乾燥しないよう、直ちに洗浄液等に浸透すること。
- (5) 塩素系及びヨウ素系の消毒剤は、腐食の原因になるので
できるだけ使用を避けること。使用中に付着したときには
水洗いすること。

- (6) 本品をクロイツフェルト・ヤコブ病(CJD)患者、又はその疑
いのある患者に使用した場合は、クロイツフェルト・ヤコブ
病(CJD)に関する国内規制及びガイドライン等を遵守するこ
と。

【保管方法及び有効期間等】

- (1) 清潔で良好な乾燥状態を保てる場所で保管する。
- (2) 滅菌した状態で貯蔵・保管する場合、再汚染を防ぐため、
清潔な場所に保管をするとともに、滅菌有効期間の管理
をすること。

【取扱い上の注意】

- (1) 使用後は、できるだけ早く血液、体液、組織等の汚物を
除去し、洗浄消毒すること。
- (2) 汚染除去に用いる洗剤は、洗浄方法に適したものを選択
し、適正な濃度で使用する。
- (3) 洗浄装置(超音波洗浄装置、ウォッシャーディスインフ
ェクタ等)で洗浄するときには、刃物同士が接触して
刃先を損傷することがないように注意すること。
- (4) 洗剤の残留がないよう十分にすすぎをすること。仕上げ
すすぎには、浄化水(濾過、蒸留、脱イオン化等)を用
いることを推奨する。
- (5) 洗浄後は腐食防止のために直ちに乾燥すること。
- (6) 可動部の動きをスムーズにするために、水溶性潤滑剤を
塗布することを推奨する。
- (7) 使用(滅菌)前に、汚れ、傷、曲がり、歯の損傷、可
動部の動き等に異常がないか点検をすること。
- (8) 点検後、セット・包装をし、高圧蒸気滅菌をすること。
- (9) 強アルカリ/強酸性洗剤・消毒剤は、器具を腐食させる
おそれがあるので、使用を避けること。金属たわし、ク
レンザー(磨き粉)等は、器具の表面が損傷するので汚物
除去及び洗浄時に使用しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社ホスピタルサービス
京都府京都市南区上鳥羽北塔ノ本町 10 番地
電話番号：075-671-2361

製造業者：サージコン社(パキスタン)
SURGICON(Pvt)Limited