

2018年3月作成(第1版)

2024年3月作成(第2版)

医療機器届出番号 26B1X10011000008

医療用品 04 整形用品

一般医療機器 医療用不織布 (JMDNコード 34655000)

アルギパッド

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- 本品に感作又はアレルギーを示す患者には使用しないこと

【形状・構造及び原理等】

アルギン酸カルシウムファイバーから成る
一層構造の多孔性ウインドドレッシング



【使用目的又は効果】

創傷又は外科切開部を処置するために用いる。

【使用方法等】

創傷部又は外科切開部を清潔にし、直接あててテープなどで固定する。

【使用上の注意】

- 傷に化膿や熱、腫れのある場合には使用しないこと。
- 包装の破損や製品の異常が認められた場合には使用しないこと。
- 本品の使用により、発疹・発赤・かゆみ等異常があらわれた場合は使用を中止し医師または薬剤師に相談すること。
- 滅菌してあるので開封後はすみやかに使用すること。
- 使用目的以外の目的で使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

貯蔵・保管方法

水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管する。

使用の期限

使用期限は包装材に記載

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社ホスピタルサービス
京都府京都市南区上鳥羽北塔ノ本町10番地
電話番号：075-671-2361

製造業者：Coreleader Biotech Company Ltd.