

器械器具 01 手術台及び治療台
一般医療機器 手術台アクセサリ (JMDN コード 70469000)

ポジパッド

【禁忌・禁止】

本製品は手術台、滑り止めパッド、ポジパッドそれぞれが直接接触することで製品性能を発揮する為、直接接触を妨げる行為を行わないこと。

本製品はディスポーザブル製品につき、使用は 1 回限りとし再使用しないこと。


【形状・構造及び原理等】

1. 形状 代表的写真

ポジパッド本体



滑り止めパッド

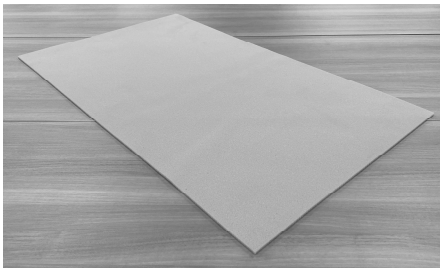

包装形態



本体寸法

ポジパッド本体：約 510mm (幅) × 840mm (長) × 30mm (厚)

滑り止めパッド：約 490mm (幅) × 840mm (長) × 5mm (厚)

2. 原材料

ホジパッド本体：ポリウレタン

滑り止めパッド：ポリウレタン

3. 原理

本製品を手術台に設置し使用することにより、手術中の患者の体位を固定、保持する。

【使用目的又は効果】

本製品は、手術台に附属するアクセサリであり、汎用手術台に取り付けて使用することを目的とする。

【使用方法等】

手術台の上に滑り止めパッドを敷き、その上にポジパッドを設置して使用する。

【使用上の注意】

- (1) 本製品を改造しないこと。
- (2) 使用前に正常に機能することを確認すること。
- (3) 使用目的（手術中の体位を固定、保持）以外の目的で使用しないこと。
- (4) 手術中、体位を換え、皮膚血流の確認をすること。
- (5) 本製品は手術台、滑り止めパッド、ポジパッドそれぞれが直接接触することで製品性能を発揮する為、直接接触を妨げる行為を行わないこと。
- (6) 本製品はディスポーザブル製品につき、使用は 1 回限りとし再使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- (1) 保管方法は高温多湿及び直射日光、水濡れを避けて保管すること。
- (2) 本製品の使用期限は、製造後 2 年とする。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社ホスピタルサービス
京都府京都市南区上鳥羽北塔ノ本町 10 番地
電話番号：075-671-2361

製造業者：株式会社高田ベッド製作所