

器 11 放射線障害防護用器具
一般医療機器 放射線防護用手袋 (38364000)

プロガード グローブ

再使用禁止


【禁忌・禁止】

1) 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

天然ゴムに鉛を混和した材料の滅菌済み手袋で、手の全体を保護するもの。

* 〈形状〉

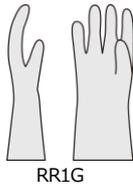

〈構造〉

表1

| **型式 | サイズ(インチ) |
|------|------------------------------|
| RR1G | 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0 |

本添付文書該当製品の製品名、型式、製造番号、サイズ等は、製品及び包装表示ラベルに記載されているので確認すること。

〈X線防護材の組成〉

天然ゴムに鉛を混和したもの。

* 〈一次X線の減弱特性〉

表2

| **型式 | 遮へい能力(%) | | | | 厚み μ (mm) |
|------|----------|-------|--------|--------|---------------|
| | 60kVp | 80kVp | 100kVp | 120kVp | |
| RR1G | 42 | 38 | 31 | 28 | 0.24 |

ASTM F2547-06「X線装置使用時に発生する放射線の防護に用いられる材料の一次X線ビームの減弱特性を測定するための標準試験方法」に準じて測定

【使用目的又は効果】

診断及び治療措置に関連した一次放射線や散乱放射線による不必要な被ばくから手の全体を保護する。

【使用方法等】

150 kV以下のX線で診療等を行う場合の散乱放射線防護用として使用する。

〈使用方法等に関連する使用上の注意〉

- 1) 一次放射線(直接線)の放射線被ばくからの保護には使用しないこと。
- 2) 手袋に損傷、又はそのおそれのある場合は使用しないこと。
- 3) 天然ゴムを使用しているためまれに、かゆみ、発赤、蕁麻疹、むくみ、発熱、呼吸困難、喘息様症状、血圧低下、ショックなどのアレルギー性症状を起こすことがある。このような症状を起こした場合には、直ちに使用を中止し、適切な措置を施すこと。
- 4) 外観に傷、変形等が見付かったときは使用しないこと。
- 5) 薬品、溶剤等によっては膨張したり、浸透したりする場合がありますので、確認の上注意して使用すること。
- 6) 刃物等鋭利なものに触れると破れたり、穴があいたりすることがあるので注意すること。

【保管方法及び有効期間等】

〈保管方法〉

水濡れ、高温になる場所や直射日光の当たる場所を避けて保管する。

〈滅菌有効期限〉

滅菌年月から3年間。(自己認証による)

【保守・点検に係る事項】

〈使用者による保守点検(日常点検)〉

日常の始業時に目視、触覚等による点検を行うこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社マエダ

住所：東京都足立区西新井本町 5-4-12

電話：03-3880-8881

外国製造業者：PROTECH LEADED EYEWEAR, INC.

国名：アメリカ合衆国

〈販売業者(販売店)〉