

光源装置用アダプタ (LS-A81/O-H、LS-A4、LS-B1)

【形状・構造及び原理等】

構造・構成ユニット

1. 構造


各光源装置に各形状のライトガイドを接続可能にするためのアダプタである。

2. 構成


- LS-A81/O-H (オリンパス/ハセガワメディカル用)
- LS-A4 (町田製作所 眼科内視鏡用)
- LS-B1 (町田製作所 眼科内視鏡用)

3. 各部の名称


- LS-A81/O-H

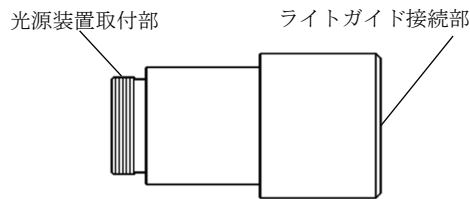

- LS-A4

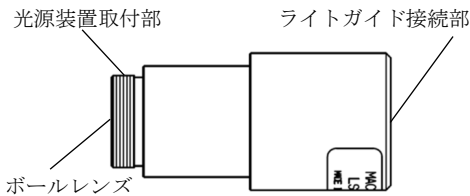

- LS-B1

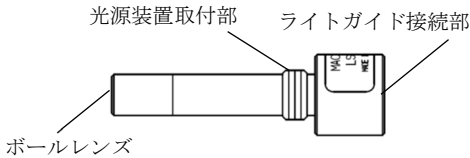

4. 仕様

項目	LS-A81/O-H	LS-A4	LS-B1
外形寸法	55.5×φ29.8 mm	61.5×φ29.8 mm	67×φ19.7 mm
重量	72 g	85 g	50 g

作動・動作原理

光源装置に取付け、ライトガイドを接続することで光源からの光をライトガイドケーブルに伝達することを可能とする。

【使用目的又は効果】

本品は、各種光源装置に形状の異なるライトガイドを接続できるよう互換性を確保するために使用する。

【使用方法等】

- 使用する光源装置およびライトガイドケーブルに応じた適切なアダプタを選択する。
- アダプタを光源装置に取り付ける。
 - LS-A81/O-H、LS-A4
光源装置純正アダプタを取り外してから取り付ける。
 - LS-B1
光源装置のライトガイド差込口に取り付ける。
- 使用するライトガイドケーブルを内視鏡接続部に接続し、内視鏡の視野を確保する。

〈組み合わせて使用する医療機器〉

	販売名	型式	届出番号
LS-A81/O-H	LED 小型光源装置	RLED-81	12B1X10015000037
LS-A4		RLED-81/Y	
LS-B1	LED 高輝度光源装置	RLED-300	12B1X10015000038

【使用上の注意】

〈重要な基本的注意〉

- 本品を用いた観察、診断、取り扱いには術野が確保された状態で慎重に行うこと。
- 光源装置に取り付けた状態でライトガイド接続部を直接見ないこと。
- 本品は、光源装置使用中および使用直後は熱くなっているため、火傷を起こさないよう取扱いには注意すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

本品の保管場所は、次の点に注意すること。

- 1) 水のかからない場所。
- 2) 気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオウ分等を含んだ空気等により、悪影響の生じるおそれのない場所。
- 3) 傾斜、振動、衝撃等のない安定した場所。
- 4) 化学薬品の保管場所やガスが発生しない場所。

2. 耐用期間

本品は消耗品（修理不可能）である。「使用者による保守点検事項」に示す点検を実施し、必要に応じて新品と交換すること。

【保守・点検に係る事項】

〈使用者による保守点検事項〉

1. 使用前に以下の事項を点検すること。点検結果により必要であれば新品と交換すること。
 - ・本品に、腐食、へこみ、亀裂、曲がり、さびがないこと。
 - ・不足の部品や緩んでいる部品がないこと。
2. 本品の清掃は、柔らかい布で空拭きする。汚れがひどいときは、中性洗剤で少しだけ湿らせて拭くこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

株式会社町田製作所

製造業者

株式会社町田製作所

販売業者の連絡先

株式会社町田製作所

〒270-1166 千葉県我孫子市我孫子 1-15-12

電話 04-7165-3083